

 **SHUTTLE**
DISCOVERY
Manuale d'uso

Nome utilizzatore:

Numero di serie:

medifab

Benvenuti

Grazie per aver acquistato lo Shuttle Discovery. Lo Shuttle Discovery è un sistema di seduta versatile e regolabile con la crescita dell'utilizzatore, completo di supporti corporei unici che possono essere utilizzati in una varietà di basi. Lo Shuttle Discovery è stato progettato come complemento allo sviluppo dell'utilizzatore. Il presente manuale mostra in che modo è possibile utilizzare in modo sicuro tutte le funzioni che lo Shuttle Discovery offre. L'uso corretto e la manutenzione del vostro Shuttle Discovery vi permetterà di usufruirne a lungo e senza problemi.

Le avvertenze di sicurezza e le istruzioni contenute nel presente manuale non possono prevedere tutti le eventualità e le situazioni impreviste che possono verificarsi. È necessario comprendere che il buon senso, la prudenza generale e la cura sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto. Si tratta di fattori di cui la persona che si prende cura dell'utilizzatore deve assumersi la responsabilità.



Leggere prima dell'uso

Tutti coloro che utilizzano questo prodotto devono leggere e comprendere questo manuale prima dell'uso. La sicurezza del bambino è responsabilità dell'operatore che se ne prende cura. Per la sicurezza del bambino e dell'operatore che se ne prende cura è importante che le funzioni e gli aspetti di sicurezza del prodotto siano compresi e che il prodotto sia utilizzato correttamente.

Medifab raccomanda che l'impostazione, i fissaggi e le regolazioni siano eseguite dopo aver letto attentamente il presente manuale.

È importante considerare il posizionamento del bambino, le limitazioni fisiche e le rispettive esigenze durante la configurazione di questo prodotto. Consultare il fornitore di ausili medici per qualsiasi domanda riguardante la configurazione e l'uso di questo prodotto.

Contattare Medifab per assistenza sulla configurazione e il montaggio, se necessario. Medifab sarà anche in grado di fornire consigli sull'uso sicuro di questo prodotto, se necessario.

Informazioni Generali e Prima di Iniziare l'uso	06
Presentazione del prodotto	07
Avvertenze e Note di Sicurezza	08
Montaggio della base Verve	13
Montaggio della seduta Discovery	14
Elementi di supporto Schienale/Bacino	15
Elementi laterali/Imbottitura Poggiapiedi/Imbottitura Seduta	16
Imbottitura Schienale/Poggiatesta	17
Configurazione Seduta Discovery	18
Profondità di seduta	18
Larghezza di seduta	19
Reclinazione e bloccaggio dello schienale	20
Altezza Schienale/Altezza Poggiapiedi, Angolo	21
Pelotte Toracali	22
Basculazione	23
Uso della base Verve	24
Installazione/Rimozione della seduta Discovery	26
Conservazione	27
Trasporto dello Shuttle Discovery in Auto	28
Avvertenze	28
Fissaggio dello Shuttle Discovery per il Trasporto	29
Staffe di fissaggio	30
Fissaggio della seduta Discovery per il trasporto	31
Accessori	32
Imbracatura a 5 punti / cinture pelviche a 4 e 2 punti	32
Imbracatura di sicurezza a 5 punti	33
Imbracatura di sicurezza a 5 punti, imbottitura a T e imbracatura con punto di attacco centrale	34
Stabilizzatore pettorale	35
Cintura pelvica a 4 punti	36
Staffa e supporto divaricatore	37
Elementi di supporto coscia e testa	38
Asta portaflebo e portabombola di ossigeno	40
Cunei seduta	41
Cuscino modulare	42
Tavolino e accessori per tavolino	44
Cinghie per piedi e accessori per poggiapiedi	48
Cappottina Parasole e Sacco Termico	49
Base a dondolo Moon Rock	50
Base Hi-Lo e Base Interna seduta	52
Base Lunar	55
Protezione impermeabile anti pioggia & seduta doppia/per fratelli	57
Informazioni di pulizia e manutenzione	58
Rivendita	59
Manutenzione: Controlli giornalieri	59
Manutenzione: Controlli semestrali	61
Modulo di registrazione del prodotto	65
Assistenza e Dati Tecnici	66

Glossario dei simboli



Avvertenze e Precauzioni - Consultare le istruzioni per l'uso



Produttore



Data di Fabbricazione



Codice Lotto



Numero Catalogo



Numero di Serie



Portata massima consentita



Consultare le istruzioni per l'uso

Informazioni Generali

Lo Shuttle Discovery è un sistema di postura per l'intervento precoce. La seduta Discovery è progettata per persone con esigenze specifiche fino a 25 kg. La seduta Discovery può essere utilizzata su basi per esterni e interni. Lo Shuttle Discovery offre la libertà di esplorare l'ambiente esterno. Per Shuttle Discovery si intende in questo manuale l'insieme seduta Discovery e base Verve. Le basi per interni - Moon Rock, Lunar e Hi-Lo - consentono di utilizzare la seduta Discovery a scuola o a casa.

I potenziali gruppi di clienti includono persone con:

- paralisi cerebrale
- basso tono muscolare
- diplegia spastica
- autismo
- bambini con difficoltà cognitive

I componenti dello Shuttle Discovery sono dispositivi medici su prescrizione medica e da banco.

Destinazione d'uso

Lo Shuttle Discovery è destinato all'uso come sistema di postura completo di basi da interno o esterno. È indicato per fornire mobilità a persone con disabilità che sono parzialmente o permanentemente non ambulatoriali e costretti in posizione seduta.

Dichiarazione di conformità

Lo Shuttle Discovery ha il marchio CE che certifica che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza pertinenti.

Medifab dichiara che lo Shuttle Discovery è conforme alle norme internazionali ISO 7176 per i sistemi di postura con basi a ruote.

Informazioni sui test specifici per tale sistema sono disponibili su richiesta.

Lo Shuttle Discovery è stato classificato come prodotto di classe 1 secondo i criteri di classificazione indicati nell'allegato IX delle linee guida 93/42/CEE.

MANDATARIO USA: Medicept
 200 Homer Ave
 Ashland, MA
 01721 USA

MANDATARIO UE : BEO MedConsulting Berlin
 GmbH Helmholtzstr. 2
 D-10587 Berlino

Garanzia

Medifab garantisce che i prodotti venduti da Medifab sono esenti da difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni dovute ad un uso improprio o alla manomissione dei nostri prodotti. Se una qualsiasi parte del prodotto risulta difettosa entro i termini e il periodo della presente garanzia, Medifab provvederà, a proprio insindacabile giudizio, a ripararla o sostituirla.

Prima di iniziare ad usare il prodotto

- **Leggere sempre** le istruzioni prima dell'uso. La mancata osservanza delle istruzioni può compromettere l'uso, impedirne il funzionamento e, cosa ancora più importante, può compromettere la sicurezza del bambino o dell'operatore.

Seduta Discovery:	2006-0010-000
base Verve:	2006-0040-000
Base a dondolo Moon Rock:	2006-0014-000
Base Hi-Lo:	Ad aria: 2006-0016-000 / Elettrica: 2006-0018-000
Base Lunar:	2006-0013-000

- **Ogni prodotto** ha un numero di serie che si trova sul prodotto. Si prega di riferire questo numero in ogni tipo di comunicazione. Vedi a pagina 62 per la posizione dei numeri di serie sui prodotti.
- I **Materiali e la schiuma** all'interno del prodotto soddisfano tutte le normative vigenti.
- In rari casi la stoffa utilizzati in questo prodotto possono causare irritazione cutanea alle persone con pelle sensibile.
- **Non** aggiungere a questo prodotto accessori diversi da quelli forniti da Medifab.
- La **seduta Discovery** è adatto ad una persona piccola e leggera con un peso massimo di 25 kg.
- Gli interventi di **manutenzione o riparazione** devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato Medifab.
- **Qualsiasi assistenza** o riparazione effettuata da qualsiasi altra persona invaliderà la garanzia e Medifab non assumerà alcuna responsabilità per lesioni o danni causati.
- **Gli strumenti** necessari per regolare lo Shuttle Discovery sono una chiave a cricchetto da 10 mm e una chiave a brugola esagonale da 4 mm.
- Assicurarsi che lo Shuttle Discovery sia completamente assemblato e montato prima dell'uso.
- **È fondamentale** che lo Shuttle Discovery venga pulito regolarmente per non ostacolare il funzionamento e per garantirne l'igiene. Vedere la sezione Pulizia e Manutenzione del presente manuale, Pag. 57.
- **Leggere il manuale di istruzioni** e assumere piena conoscenza di tutte le regolazioni disponibili.
- **Il prescrittore o l'operatore** ha la responsabilità di garantire che il prodotto sia disposto correttamente per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore.
- Lo **Shuttle Discovery** non è fornito come prodotto sterile.

- **Prescrittori e operatori** devono essere messi a conoscenza dei seguenti capitoli fondamentali del presente manuale;

• Prima di iniziare l'uso:	Pag 07
• AVVERTENZE:	Pag 08-12
• Reclinazione e bloccaggio dello schienale:	Pag 20
• Angolo del poggiatesta:	Pag 21
• Basculazione:	ag 23
• Uso della base Verve:	Pag 24-25
• Installazione e rimozione della seduta Discovery:	Pag 26
• Conservazione del vostro Shuttle Discovery:	Pag 27
• Trasporto dello Shuttle Discovery in auto:	Pag 28-31
• Regolazione delle cinture pelviche / Imbracature:	Pag 32-36
• Montaggio del divaricatore:	Pag 37
• Uso del tavolino:	Pag 44-47
• Regolazione cinghie per piedi:	Pag 48
• Uso della base a dondolo Moon Rock:	Pag 50-51
• Uso della base Hi-Lo:	Pag 52-53
• Uso della base Lunar:	Pag 54-55
• Informazioni di pulizia e manutenzione	Pag 57
• Controlli di manutenzione giornalieri:	Pag 58-59
• Controlli di manutenzione semestrali:	Pag 60-62



Si prega di leggere integralmente questo libretto di istruzioni prima dell'uso e di conservarlo per riferimenti futuri. Si prega di prestare particolare attenzione alle avvertenze elencate nelle prossime quattro pagine. La mancata osservanza di queste raccomandazioni può causare gravi lesioni o la morte dell'utilizzatore o dell'operatore.



LIMITI DI PESO

Il sovraccarico della seduta Discovery può danneggiare il prodotto o causare il ribaltamento dello Shuttle Discovery causando gravi lesioni al bambino e/o all'operatore.

- La portata massima della base Verve è di 55 kg e il cestino alla base per la conservazione della base Verve è di 5 kg (senza accessorio adibito per assistenza in patologie critiche).
- La portata massima per la seduta Discovery è di 25 kg.
- La portata massima per la base Hi-Lo è di 50 kg.



COME USARE LO SHUTTLE DISCOVERY

- Lo Shuttle Discovery può essere utilizzato solo su superfici livellate / piane, come calcestruzzo, asfalto, pavimenti interni e moquette.
- Lo Shuttle Discovery non è adatto per fare jogging / running. Fermate brusche possono causare il ribaltamento della base causando gravi lesioni al bambino e/o a terzi.
- L'operatore deve avere familiarità con il funzionamento dello Shuttle Discovery.



COME REGOLARE LO SHUTTLE DISCOVERY

- Utilizzare solo componenti / accessori approvati da Medifab.
- Si prega di richiedere una revisione periodica del prodotto al fornitore di ausili medici per garantire che lo Shuttle Discovery soddisfi le mutevoli esigenze dell'utilizzatore.
- Dopo aver effettuato qualsiasi regolazione, assicurarsi che tutte le viti / manopole allentate vengano di nuovo saldamente serrate.
- Accertarsi che i bambini non entrino in contatto con parti in movimento durante la chiusura o l'apertura della base o durante le regolazioni.



PRIMA DELL'USO DEL DISCOVERY - CONTROLLI DI SICUREZZA

- Controllare che lo Shuttle Discovery sia completamente aperto / bloccato, che la seduta sia montata saldamente e che le ruote siano bloccate.
- Controllare che le ruote posteriori e anteriori siano completamente ingranate e bloccate. Se le ruote non sono bloccate, lo Shuttle Discovery può ribaltarsi causando gravi lesioni al bambino.
- Controllare che lo Shuttle Discovery si stia muovendo senza intoppi e funzioni correttamente. Qualsiasi rumore, vibrazione o movimento insolito del prodotto può essere causato da elementi di fissaggio allentati o da danni al prodotto. Contattare il distributore dello Shuttle Discovery o Medifab che vi aiuterà a risolvere eventuali problemi.
- Non utilizzare il prodotto fino a quando il problema non sarà stato risolto.



USO DELLO SHUTTLE DISCOVERY

- Praticare gli spostamenti fino a quando non si è sicuri di essere in grado di farlo in modo sicuro.
- Inserire sempre i freni di stazionamento prima di posizionare il bambino nello Shuttle Discovery o per rimuoverlo da esso.
- Bloccare il bambino con tutte le cinture in dotazione non appena il trasferimento è stato completato.
- Assicurarsi che le cinture siano regolate per il bambino e per i cambi di vestiti. Accertarsi che le cinture siano montate sotto il supporto pelvico e in modo da garantire una postura corretta e sicura.
- Non lasciare mai il bambino incustodito nello Shuttle Discovery, nemmeno per tempi brevi.
- Prima iniziare gli spostamenti, assicurarsi che il bambino stia comodo e che vestiti, coperte, ecc. siano sistemati in modo che non si aggancino alle ruote.
- Un operatore responsabile e con forza adeguata deve spingere e supervisionare lo Shuttle Discovery durante l'uso.
- Non permettere al bambino di entrare nello Shuttle Discovery senza assistenza.





OSTACOLI DI PERCORSO

Prestate attenzione a come il bambino desidera muoversi o essere spostato. La collaborazione tra operatore e bambino riduce il rischio di lesioni durante le operazioni di sollevamento e di manovra.



- Il Discovery non deve essere utilizzato su pendii con inclinazione superiore al 10%.
- Quando si utilizza lo Shuttle Discovery su un pendio, assicurarsi che la seduta Discovery sia in posizione verticale e che lo schienale non sia reclinato.
- Non azionare i freni per rallentare lo Shuttle Discovery. L'arresto improvviso potrebbe causare il ribaltamento dello Shuttle Discovery e ferire il bambino.
- Tenere saldamente lo Shuttle Discovery quando ci si trova vicino a veicoli stradali in movimento, treni o venti forti. Anche con il freno di stazionamento inserito, la corrente d'aria causata dal veicolo in movimento o del vento possono spostare lo Shuttle Discovery. Utilizzare il CINTURINO DI SICUREZZA DA POLSO in tutte queste situazioni e mentre si percorre una discesa.
- Prestare attenzione nel salire e scendere i cordoli.

Per scendere da un cordolo, girare lo Shuttle Discovery in modo da posizionarsi dietro di esso. Guardando sopra la spalla, abbassare le ruote posteriori sul terreno più basso. Tirare con cautela lo Shuttle Discovery all'indietro e abbassare delicatamente le ruote anteriori sul suolo.

Per salire su un marciapiede, avvicinatevi al marciapiede e inclinate delicatamente lo Shuttle Discovery sulla ruota posteriore fino a quando le ruote anteriori hanno superato il marciapiede. Abbassare delicatamente le ruote anteriori sul terreno più alto e sollevare con cautela le ruote posteriori sul terreno più alto.

Per superare ostacoli come gradini e cordoli, inclinare lo Shuttle Discovery sulle ruote posteriori (tirarlo all'indietro per salire; per scendere, abbassarlo lentamente in avanti).

- Utilizzare l'elemento di aiuto come mostrato nella figura (A) per inclinare lo Shuttle Discovery nel caso in cui dovesse essere necessario.
- Non tentare di portare lo Shuttle Discovery su o giù su una rampa di scale a meno che non si disponga di un aiuto e si è sicuri di poter sostenere il peso. Quando si salgono le scale, avere sempre lo Shuttle Discovery e il bambino rivolto all'indietro. Quando si scendono le scale tenere sempre lo Shuttle Discovery e il bambino rivolti in avanti, fronte-operatore.
- Il sollevamento dello Shuttle Discovery con il bambino è un'operazione che deve essere eseguita da almeno due persone. Sollevare sempre la base Verve afferrando il maniglione e il telaio inferiore. Non sollevarlo utilizzando qualsiasi altra parte della seduta Discovery come poggiatesta, tavolino o ruote. Il tavolino deve essere rimosso e verificare che il bambino sia sicuro e che tutte le cinture siano state agganciate prima di provare a sollevarlo. Non sollevare utilizzando i parafranghi, potrebbero sganciarsi.
- Rimuovere il bambino prima di salire o scendere scale mobili. Non utilizzare mai lo Shuttle Discovery su una scala mobile.
- Azionare sempre il freno di stazionamento quando lo Shuttle Discovery è fermo. Non utilizzare mai i freni di stazionamento per rallentare lo Shuttle Discovery.
- Borse e altri oggetti non devono essere appesi al maniglione.
- Non permettere ai bambini di spingere lo Shuttle Discovery.

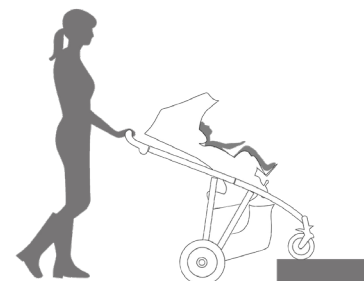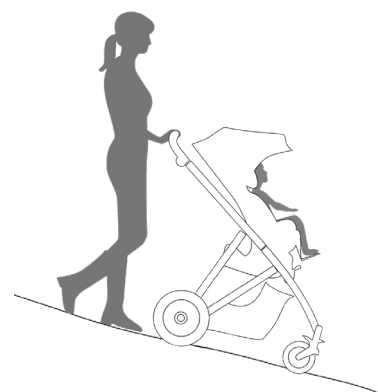



BARICENTRO

- Si prega di notare che i fattori elencati di seguito possono interferire con il baricentro. La mancata osservanza di questi fattori può causare il ribaltamento dello Shuttle Discovery e ferire il bambino.
- Non superare la portata massima di 55 kg prevista per lo Shuttle Discovery.
- Prestare particolare attenzione quando si utilizza lo Shuttle Discovery su un pendio o quando si devono superare degli ostacoli. Mantenere sempre la seduta e lo schienale in posizione verticale quando si percorre un pendio.
- Osservare con attenzione l'ambiente circostante, un impatto improvviso con degli ostacoli potrebbe far ribaltare lo Shuttle Discovery.
- Non parcheggiare mai lo Shuttle Discovery su un pendio.
- Non appendere borse sul maniglione di spinta. Utilizzare il cestino sotto alla seduta.
- Non lasciare che i bambini si appendano / stiano in piedi sullo Shuttle Discovery o su altre strutture di supporto o basi interne.
- Non lasciare che il bambino si alzi dalla seduta o si inclini a sinistra o a destra per raggiungere un oggetto.
- Non permettere al bambino di mettersi in piedi sul poggiatesta o di entrare da solo nello Shuttle Discovery.



COMPONENTI E ACCESSORI DEL DISCOVERY

- Assicurarsi che il bambino indossi sempre la cintura pelvica e l'imbracatura per le spalle correttamente montate e regolate.
- L'operatore deve sapere come montare, regolare e sganciare le fibbie e i ganci delle cinture pelviche, imbracature e stabilizzatori.
- Non stare in piedi sul poggiatesta.
- Accertarsi sempre che lo schienale della seduta Discovery sia tenuto fermo con una mano per fornire maggiore sicurezza e controllo quando si regola l'angolo dello schienale o quando si utilizza la funzione di basculazione.
- Assicurarsi che le ruote siano sempre bloccate quando lo Shuttle Discovery è fermo.
- Quando si utilizza la cintura pelvica o lo stabilizzatore, assicurarsi che la posizione dell'imbracatura sia anatomicamente corretta. Assicurarsi che l'imbottitura non infastidisca la gola.
- Componenti piccoli, se allentati, rappresentano un potenziale pericolo per i bambini piccoli.



MANUTENZIONE

- Lo Shuttle Discovery richiede una manutenzione regolare da parte dell'operatore. Prima di ogni utilizzo devono essere eseguiti quotidianamente controlli di base. Ogni sei mesi deve essere realizzato un controllo accurato della Shuttle Discovery da parte dell'operatore o dal distributore autorizzato Medifab. Per le riparazioni devono essere utilizzati solo pezzi di ricambio originali.



TRASPORTO / SICUREZZA SUI VEICOLI A MOTORE

- Lo Shuttle Discovery è stato testato in conformità alla norma ISO 7176-19 per le basi a ruote. Parte 19: dispositivi per la mobilità su ruote da utilizzare come sedili sui veicoli a motore.
- Non utilizzare la seduta per il trasporto di un secondo bambino.
- Non utilizzare mai la seduta Discovery come seggiolino per auto.
- Trasferire il bambino sul seggiolino auto e utilizzare i sistemi di ritenuta installati dal costruttore del veicolo ogni volta che sia possibile.
- Quando si utilizza lo Shuttle Discovery per gli spostamenti, l'accessorio tavolino in plastica deve essere rimosso dalla seduta Discovery.
- Le cinture pelviche e le cinture toraciche di correzione posturale NON sono sistemi di ritenuta per gli occupanti di veicoli a motore. Per ulteriori dettagli e indicazioni, fare riferimento alla sezione Uso dello Shuttle Discovery per il Trasporto su Veicoli a Motore.
- Bloccare sempre la basculazione della seduta e lo schienale reclinabile utilizzando i pistoncini di sicurezza ROSSI forniti in dotazione.
- Durante il trasporto all'interno del veicolo, lo Shuttle Discovery non occupato deve essere fissato.
- NON utilizzare lo Shuttle Discovery (seduta o base) se è stato coinvolto in un incidente automobilistico.



ALTRE AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- L'operatore deve prendere precauzioni contro i rischi d'incendio. In tutti gli edifici, controllare l'ubicazione delle uscite sicurezza antincendio e assicurarsi che le procedure siano comprese. Non utilizzare lo Shuttle Discovery in prossimità di un incendio o di una fiamma esposta.
- Tenere lo Shuttle Discovery lontano da fonti di calore come fiamme, sigarette, fiamme libere, sistemi di riscaldamento, radiatori, ecc.
- Pulire e asciugare lo Shuttle Discovery se bagnato.
- Prestare attenzione quando si chiude o si apre la base Verve per evitare di schiacciarsi le dita.
- Utilizzare lo Shuttle Discovery solo ad una velocità di marcia normale / costante. Non lasciare andare la base mentre la si spinge. Utilizzare il cinturino di sicurezza in dotazione come mostrato a destra.
- Solo per ruote: non gonfiare eccessivamente le ruote della base Verve. Gonfiare manualmente a 1,5 bar (20-22 psi).



AVVERTENZA! Assicurarsi sempre che le manopole rosse di sgancio della seduta siano sempre correttamente innestate quando la seduta Discovery viene utilizzata su qualsiasi base di supporto.



AVVERTENZA! Non lasciare il bambino esposto al sole. La cappottina parasole di questo prodotto non proteggerà l'utilizzatore dai danni dei raggi solari.



AVVERTENZA! Non lasciare mai il bambino incustodito nello Shuttle Discovery, nemmeno per tempi brevi.

Disimballaggio della base Verve

Rimuovere tutti gli imballaggi e controllare di aver ricevuto tutte le parti ordinate.

AVVERTENZA!

Assicurarsi che i bambini non giochino con il materiale di imballaggio, in particolare con i sacchetti di plastica.





Apertura della base Verve

Sollevare le leve di bloccaggio del telaio (A) situate su entrambi i lati del telaio.

Premere i pulsanti di regolazione dell'angolo del maniglione di spinta (B) per raddrizzare il maniglione di spinta verso l'alto.

Sganciare il fermo portaoggetti (C) per sbloccare il telaio inferiore.

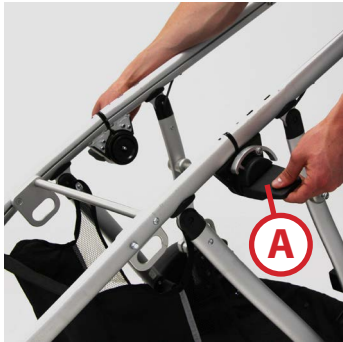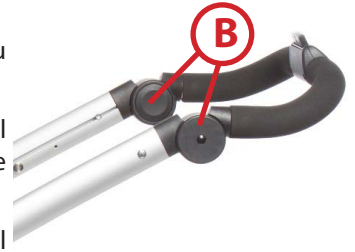

Blocco della base Verve

Aprire completamente il telaio, la leva di blocco di sicurezza secondaria (D) si bloccherà automaticamente una volta che il telaio è in posizione aperta.

Spingere verso il basso le leve di sblocco (A) per bloccare completamente il telaio.



Montaggio delle ruote posteriori

Far scorrere il parafrangente di plastica (E) sul telaio.

Fissare il perno a sgancio rapido (F) della ruota posteriore al telaio.

Controllare che le ruote siano correttamente montate cercando di estrarle nuovamente. Le ruote posteriori possono essere rimosse per rendere il passeggino più compatto e quindi più facile da conservare. Eseguire questa operazione premendo il centro del perno a sgancio rapido (F) e rimuovere le ruote.

N.B.: le ruote posteriori possono essere gonfiate con una pompa a mano ad una pressione massima di gonfiaggio di (20-22 psi) 1,5 bar.



Montaggio delle ruote anteriori

Premere il perno di bloccaggio (G) e inserire le ruote anteriori sul telaio anteriore.



1. Cuscino poggiatesta con appoggio occipitale
2. Cinture per le spalle imbottite
3. Pelotte Toracali
4. Pelotte Schienale
5. Elementi di supporto per il bacino
6. Cuscino di seduta
7. Manopola di sblocco seduta
8. Poggiatesta rialzato
9. Basculazione della seduta
10. Sistema fissaggio tavolino
11. Sistema fissaggio parasole
12. Elementi di supporti poggiatesta (esterni)

Disimballaggio della seduta Discovery

Rimuovere tutti gli imballaggi e controllare di aver ricevuto tutte le parti ordinate.


Gli strumenti necessari per regolare il vostro Shuttle Discovery sono una chiave a cricchetto da 10 mm e una chiave a brugola esagonale da 4 mm.



AVVERTENZA

Assicurarsi che i bambini non giochino con il materiale di imballaggio, in particolare con i sacchetti di plastica.



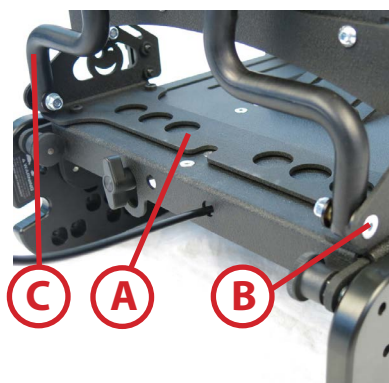

Sistemazione dello schienale

Sollevere lo schienale fino a quando il foro nel tubo trasversale posteriore dello schienale (C) si allinea con il foro nella staffa di profondità seduta (A).

Far scorrere la boccola in ottone nel foro del tubo trasversale posteriore dello schienale (C). Posizionare la grande rondella di plastica tra il tubo trasversale (C) e la staffa di profondità seduta (A).

Inserire quindi la vite a testa svasata (B) nella boccola in ottone nel tubo trasversale posteriore.

(C) attraverso la staffa di profondità seduta e la grande rondella di plastica nera (D).



Fissare il gruppo facendo scorrere sulla vite a testa svasata una rondella, (F) seguita da un dado nyloc (G). Utilizzando una chiave a brugola esagonale da 4 mm e una chiave a cricchetto da 10 mm, serrare il gruppo.

N.B.:

Assicurarsi che il gruppo sia ben serrato e che le filettature delle viti a testa svasata (B) siano penetrate attraverso l'anello in plastica sul dado nyloc (D). Assicurarsi che la filettatura sia visibile oltre l'anello nyloc.

Seguire la stessa procedura per fissare il lato opposto del tubo posteriore dello schienale alla staffa di profondità della seduta.

Accertarsi che entrambi i punti di articolazione assemblati non siano eccessivamente serrati e che lo schienale possa ancora essere regolarmente inclinato.

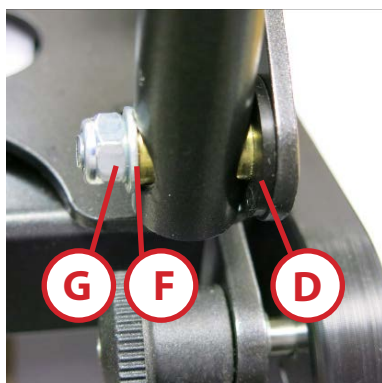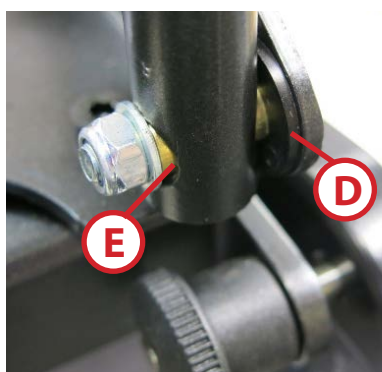

Fissaggio degli elementi di contenimento del bacino

Fissare gli elementi di contenimento del bacino alla staffa di profondità seduta (B) con i bulloni (H). Seguire la stessa procedura per fissare l'elemento di contenimento del bacino opposto.



Fissaggio delle pelotte toracali




Aumentare l'altezza dello schienale (vedi pag. 21) e sollevare la schiuma dello schienale (se presente). Posizionare le due rondelle di plastica (B) sulla filettatura della piastra di fissaggio (A), inserire la piastra di fissaggio nelle fessure.

Far scorrere la staffa per l'altezza toracica (C) sulle filettature esposte.

Fissare la filettatura inferiore con una rondella metallica (D) e serrare leggermente il dado (G) con una chiave a cricchetto/tubo. Fissare la filettatura superiore con una rondella metallica (D) e la manopola (E).

Assicurarsi che la staffa per l'altezza del tronco (C) scorra senza intoppi verso l'alto e verso il basso. (l'altezza della staffa si regola con la manopola (E).)


Fissare la pelotta toracale alla staffa toracale (C) con le viti (F). Seguire la stessa procedura per fissare la pelotta toracale opposta.

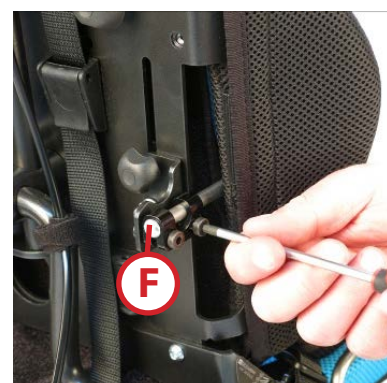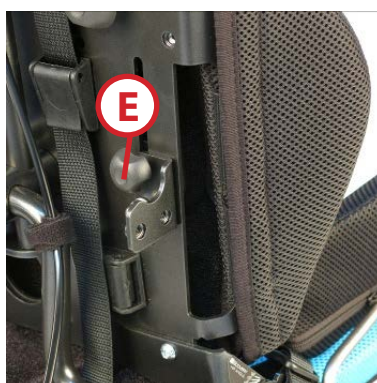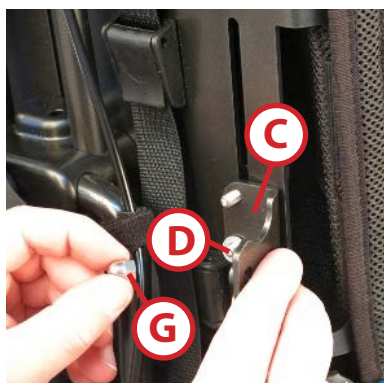*Fissaggio dell'imbottitura sul poggiatesta*

Fissare l'imbottitura sul bordo anteriore della seduta con il velcro.

Fissaggio dell'imbottitura della seduta

Fissare l'imbottitura alla base della seduta e sulla parte posteriore della base della seduta utilizzando il velcro.

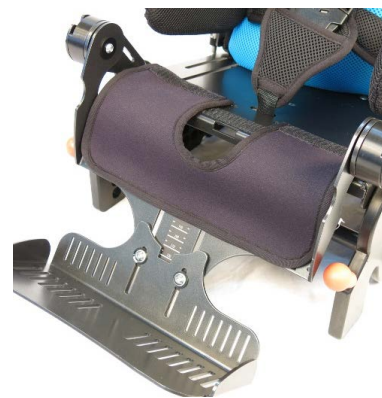**N.B.:**

Assicurarsi che il velcro sulla base della seduta e l'imbottitura vengano regolarmente pulite (vedi pag. 57).



Fissaggio dell'imbottitura dello schienale

Agganciare la parte superiore dell'imbottitura dello schienale sulla parte superiore e le spalline dello schienale in metallo. Ribaltare la metà inferiore dell'imbottitura sotto lo schienale.




Fissaggio dell'imbottitura laterale dello schienale

Far scorrere l'imbottitura laterale dello schienale sulle laterali metalliche dello schienale. Fissare l'imbottitura con il velcro presente sull'imbottitura stessa e sullo schienale in metallo.



Fissaggio del poggiatesta occipitale

Fissare il velcro sul retro del poggiatesta occipitale all'imbottitura dello schienale.

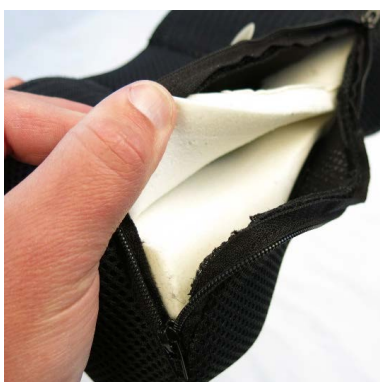

Regolazione del poggiatesta

Se il poggiatesta spinge la testa del bambino in avanti, è possibile rimuovere lo «STRATO» di schiuma dal poggiatesta.

Aprire quindi la cerniera del rivestimento e rimuovere la schiuma interna. Staccare lo strato e riposizionare il rivestimento. Infine, chiudere la cerniera del rivestimento.

Il prescrittore o l'operatore ha la responsabilità di essere a conoscenza di tutte le regolazioni disponibili e di assicurarsi che il prodotto sia disposto correttamente per soddisfare le esigenze del bambino.

Medifab raccomanda di conservare un documento scritto formale per tutte le impostazioni e le verifiche di manutenzione. Alla fine di questo manuale è disponibile un modulo di registro del prodotto.

Prima di posizionare il bambino sulla seduta, accertarsi che siano state effettuate le seguenti regolazioni. Se l'operatore ha domande o se sono necessarie ulteriori informazioni, contattare il fornitore di ausili medici dell'utilizzatore o Medifab.

1. Profondità della seduta
2. Larghezza della seduta
3. Altezza dello schienale
4. Altezza del poggiatesta

Gli strumenti necessari per regolare il vostro Shuttle Discovery sono una chiave a cricchetto da 10 mm e una chiave a brugola esagonale da 4 mm.




Profondità della seduta

Togliere o spingere lateralmente l'imbottitura della seduta per scoprire le quattro viti **(A)** poste alla base della seduta.


Allentare le quattro viti **(A)** di qualche giro con la chiave a brugola esagonale. Una volta che la staffa di profondità seduta **(B)** sia stata allentata, posizionare la staffa per ottenere la profondità di seduta desiderata.

Fissare saldamente le quattro viti.

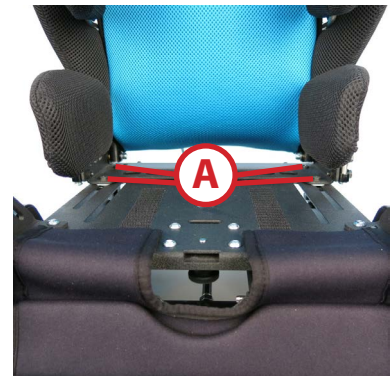


N.B.:

Accertarsi che il gruppo sia ben stretto. Non regolare la profondità della seduta se il bambino è seduto sulla seduta.

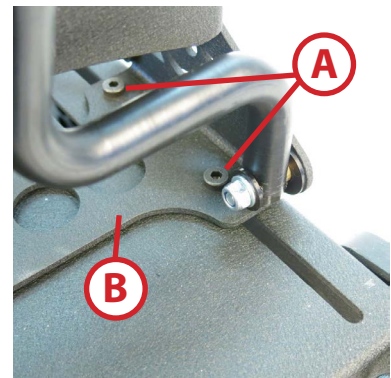

Guida bacino / Larghezza seduta

Allentare di qualche giro le due viti **(A)** e i due bulloni **(B)**. Ora è possibile regolare la larghezza, la profondità e l'angolo della guida del bacino. Una volta raggiunta una posizione ottimale, serrare nuovamente viti e bulloni.

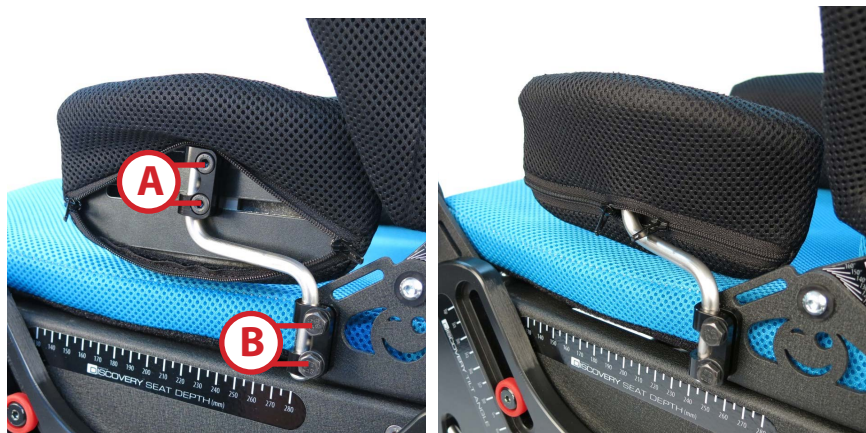

N.B.:


Accertarsi che entrambe le guide del bacino siano disposte centralmente rispetto allo schienale per allineare correttamente il bacino dell'utilizzatore.

Reclinazione dello schienale

Allentare la manopola **(B)** e estrarre il pistoncino rosso di sicurezza **(A)** per sbloccare lo schienale. Mentre si tira il pistoncino, reclinare lo schienale in base all'angolo desiderato. Rilasciare il pistoncino e bloccare la manopola **(B)**.


Per posizionare lo schienale in posizione verticale a 90°, rilasciare la manopola manuale e tirare il pistoncino rosso.

Alzare lo schienale a 90° rispetto alla seduta e rilasciare il pistoncino rosso **(A)** e quindi fissare la manopola **(B)**.

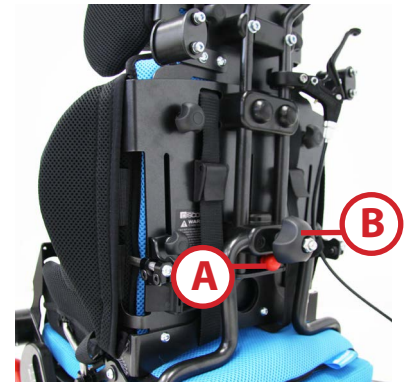

AVVERTENZE

1. Assicurarsi che il pistoncino rosso di sicurezza **(A)** sia sempre inserito quando lo schienale è a 90°, in posizione verticale.
2. Tenere sempre saldamente lo schienale quando si regola l'angolo dello schienale.
3. Controllare sempre che la manopola **(B)** sia ben stretta prima di trasferire il bambino sul Discovery Seat.
4. Allentare la manopola solo di pochi giri e non applicare mai troppa forza per allentare la manopola, poiché ciò potrebbe far inceppare la manopola stessa.

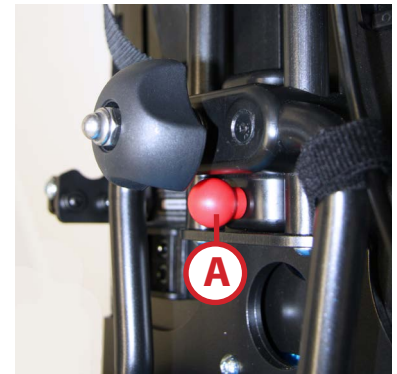

Trasporto

Quando si utilizza lo Shuttle Discovery per il trasporto su veicoli a motore, è fondamentale che lo schienale della seduta Discovery venga fissato in posizione verticale.

Per bloccare lo schienale


Posizionare lo schienale a 90 gradi rispetto alla seduta. Il pistoncino rosso di sicurezza **(A)** dovrebbe autobloccarsi in questa posizione. Controllare che il pistoncino sia inserito e quindi stringere la manopola **(B)**.



AVVERTENZA

Se lo schienale non viene fissato in posizione verticale potrebbe muoversi e, in caso di incidente, causare gravi lesioni o la morte del bambino o di altre persone.

Altezza dello schienale

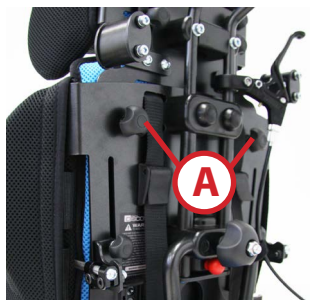


Allentare le due manopole **(A)** di qualche giro. Tirare delicatamente lo schienale interno verso l'alto utilizzando la maniglia. Una volta raggiunta l'altezza desiderata, stringere le due manopole.



AVVERTENZE

Accertarsi che dopo la regolazione le manopole vengano ben strette.

Altezza della pedana

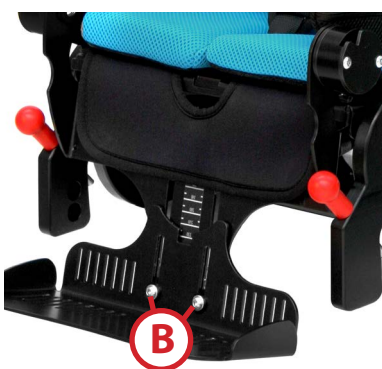

Allentare le due viti **(B)** di qualche giro con la chiave a brugola esagonale. Posizionare il poggiatesta all'altezza desiderata e stringere le viti.

Il poggiatesta inferiore può essere ruotato a testa in giù se si desidera ridurre ulteriormente la misura dalla seduta al poggiatesta.



AVVERTENZE

1. Assicurarsi che il poggiatesta sia sempre ben stretto. Se la pedana non fornisce supporto ai piedi, c'è la possibilità che il bambino possa scivolare dalla seduta provocando asfissia a causa delle cinture pelviche, o dell'imbracatura di sicurezza a 5 punti.
2. Il poggiatesta della seduta Discovery non è progettato per supportare il peso del bambino. Prestare particolare attenzione quando si trasferisce l'utilizzatore sulla seduta. Non sostare sul poggiatesta.
3. Accertarsi che i piedi del bambino non rimangano bloccati dietro il poggiatesta.



Angolo della pedana

Allentare di qualche giro la manopola a farfalla **(C)** fino a sbloccare la pedana. Posizionare il poggiatesta con l'angolo desiderato e stringere nuovamente la manopola a farfalla.



AVVERTENZE

1. Fare attenzione quando si inclina il poggiatesta, in quanto le dita potrebbero rimanere schiacciate.
2. Non sostare sul poggiatesta.





Pelotte Toracali

Allentare le quattro viti **(A)** di qualche giro. Ora è possibile regolare la larghezza, la profondità e l'angolo delle pelotte toracali. Una volta raggiunta una posizione ottimale, stringere nuovamente le viti.

Un'ulteriore regolazione in altezza è possibile allentando le manopole **(B)**. Una volta raggiunta una posizione ottimale, stringere nuovamente le manopole.

N.B.:

Assicurarsi che le pelotte toracali siano posizionate in modo da mantenere una posizione centrale del tronco.

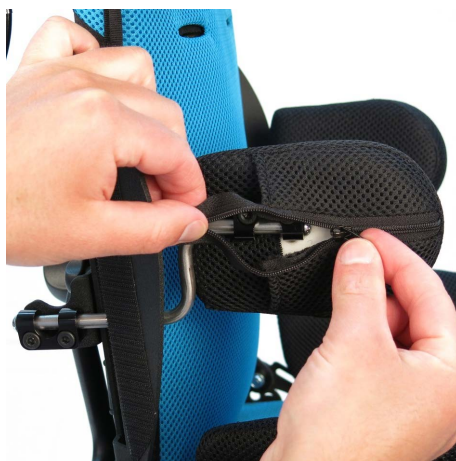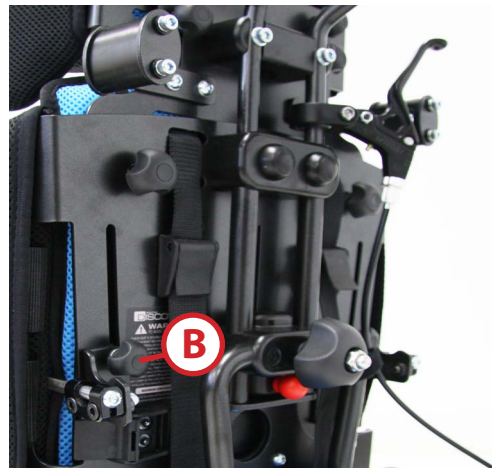

Basculazione della seduta



Tirare e ruotare i pistoncini di sicurezza (A) per sbloccare i blocchi dell'inclinazione. Con i pistoncini di sicurezza in posizione «sbloccata» tenere la manopola dello schienale (B) e premere la leva (C) e inclinare l'inserto della seduta all'angolo desiderato.

Per bloccare l'angolo, rilasciare la leva (C).


Posizione verticale

Premere la leva (C) e ruotare la seduta in posizione eretta. Per reinserire i pistoncini di sicurezza (A), tirare e ruotare i pistoncini di sicurezza in modo che riescano ad inserirsi.



AVVERTENZE

1. Tenere sempre saldamente la manopola dello schienale per garantire maggiore sicurezza e controllo durante l'inclinazione della seduta.
2. Consultare il fornitore di ausili medici dell'utilizzatore per indicazioni su come inclinare la seduta Discovery. Un angolo della seduta inadeguato può causare problemi di respirazione o alimentazione di alcuni utilizzatori.
3. Prestare attenzione quando si bascula la seduta. Assicurarsi che le mani del bambino non siano vicine ai supporti laterali in plastica in quanto vi è la possibilità di schiacciarsi le dita.
4. Quando si utilizza la seduta Discovery per il trasporto nei veicoli a motore è fondamentale che la seduta venga basculata all'indietro e i pistoncini di sicurezza vengano bloccati. Vedere immagine (D).

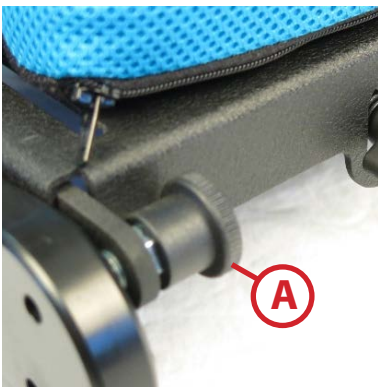

Per bloccare la basculazione della seduta

Con i pistoncini di sicurezza in posizione «bloccata», premere la leva di basculazione e inclinare l'intera seduta fino a quando i pistoncini di sicurezza si innestano entrambi nel foro inferiore. Rilasciare la leva.




AVVERTENZE

Il mancato inserimento dei pistoncini di sicurezza per bloccare la basculazione consente di inclinare liberamente l'intera seduta e, in caso di incidente, può causare gravi lesioni o la morte del bambino o di altre persone.

Meccanismo di Blocco della Rotazione

Per bloccare la rotazione delle ruote anteriori, sollevare la leva grigia (A). Per sbloccare il meccanismo di blocco girevole, spingere verso il basso la leva grigia (A).

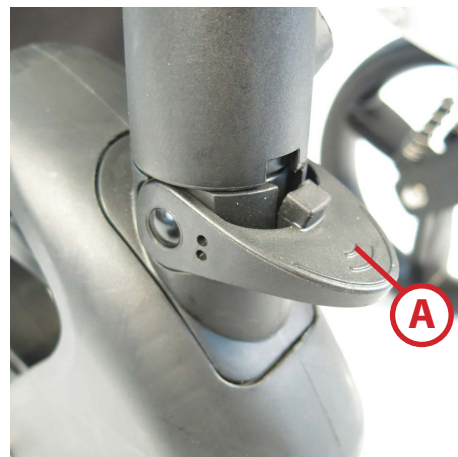

Freno di Stazionamento

Per disinserire il freno di stazionamento premere il pulsante del freno (B) sul maniglione di spinta. Per inserire i freni: premere il bottoncino rosso sul manubrio (C).



AVVERTENZA!


Non utilizzare mai il freno di stazionamento per rallentare lo Shuttle Discovery. Un arresto improvviso potrebbe ribaltarlo causando gravi lesioni al bambino e all'operatore.



AVVERTENZA!

Utilizzare sempre i freni di stazionamento durante il trasferimento del bambino sul Discovery Shuttle.


Chiusura della base Verve

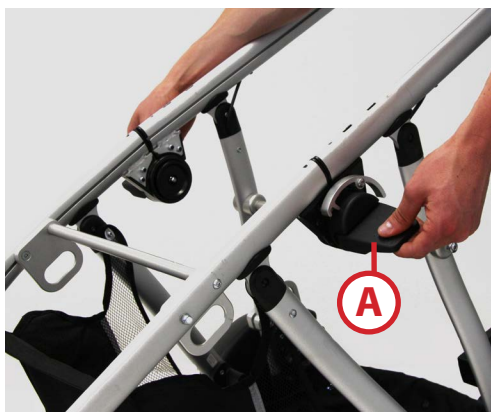

Assicurarsi che il bambino sia stato tolto dalla seduta.

Assicurarsi che la seduta aggiuntiva per fratelli sia stato rimossa. Vedi pag. 56.

Sollevare le due leve di bloccaggio del telaio **(A)** su entrambi i lati del telaio.

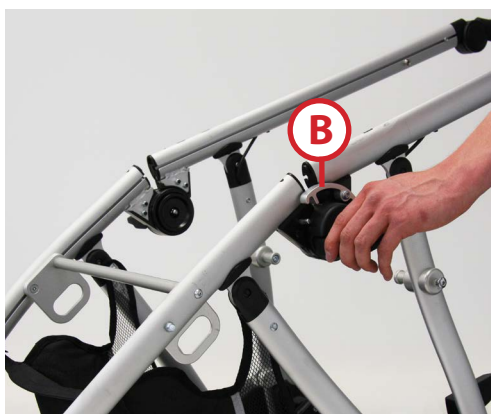


Premere la leva di blocco di sicurezza **(B)** sul lato sinistro del telaio.

Tenendo premuta la leva di blocco di sicurezza **(B)**, spingere leggermente verso il basso il maniglione di spinta.



Continuare a spingere il maniglione di spinta verso il basso fino a quando il fermo di chiusura **(C)** sia stato innestato.

Spingere verso il basso la leva di bloccaggio del telaio per bloccare il telaio ripiegato.

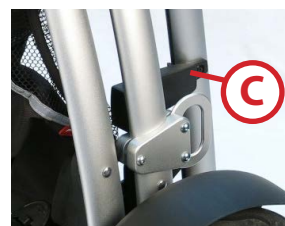

AVVERTENZA!

Prestare attenzione durante la chiusura o l'apertura del telaio per evitare lo schiacciamento delle dita.

Rivolto in avanti

Prima di installare la seduta Discovery sulla base Verve, inserire il freno di stazionamento.


Posizionare la parte posteriore della seduta Discovery sul passeggino. Far scorrere la fessura posteriore della seduta sui perni di montaggio posteriori **(A)** della base.

Abbassare la parte anteriore della seduta sulla barra di montaggio anteriore **(B)** della base. I due pistoncini rossi di sicurezza **(C)** devono essere bloccati sulla barra di montaggio anteriore. In caso contrario premere sulla parte anteriore della seduta.

Accertarsi che entrambi i pistoncini di sicurezza siano inseriti provando di sollevare la seduta mentre si tiene giù la base.

**AVVERTENZA**

Verificare sempre che i due pistoncini rossi di sicurezza siano inseriti e che la seduta sia fissata prima di utilizzarla.

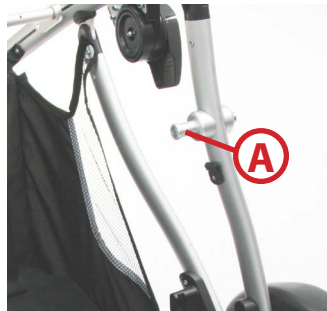*Montaggio all'indietro*

Posizionare in avanti la parte posteriore della seduta Discovery sulla base. Far scorrere la fessura posteriore della seduta sulla barra di montaggio **anteriore (A)** del passeggino.

Abbassare la parte anteriore della seduta sulla barra di montaggio posteriore della base.

I due pistoncini rossi di sicurezza **(C)** devono essere bloccati sulla barra di montaggio posteriore. In caso contrario, premere sulla parte anteriore della seduta.

Il tavolino NON può essere montato sulla seduta Discovery quando la seduta è rivolta all'indietro.

**AVVERTENZE**

1. Verificare sempre che i due pistoncini rossi di sicurezza siano inseriti e che la seduta sia fissata prima di utilizzarla.
2. Costatare la lunghezza della base e l'ambiente circostante in cui lo Shuttle Discovery viene utilizzato. Utilizzare sempre tutte le cinture di posizionamento in dotazione.

Rimozione della seduta Discovery

Prima di rimuovere la seduta Discovery dallo Shuttle Discovery, inserire il freno di stazionamento.

Liberare i pistoncini rossi di sicurezza tirando le manopole rosse **(C)**. Una volta che la parte anteriore della seduta è sbloccata, reclinare lo schienale della seduta e rimuovere la seduta dalla barra di montaggio posteriore.

**AVVERTENZE**

1. Mantenere sempre correttamente la seduta Discovery con entrambe le mani.
2. Non installare o rimuovere mai la seduta Discovery con il bambino seduto sulla seduta.






Sistemazione nel bagagliaio dell'auto o in uno spazio del veicolo


Per conservare il vostro Shuttle Discovery, vi raccomandiamo i seguenti passaggi:

1. **Rimuovere** la seduta Discovery dallo Shuttle Discovery.
2. **Piegare** la base.
3. **Rimuovere** le ruote, se necessario.
4. **Inclinare** il poggiatesta orizzontalmente (**A**).
5. Se si desidera che la lunghezza totale della seduta Discovery sia più corta, è possibile staccare il meccanismo di inclinazione del poggiatesta, in modo che il poggiatesta possa oscillare verso l'alto sulla seduta - vedi sotto.

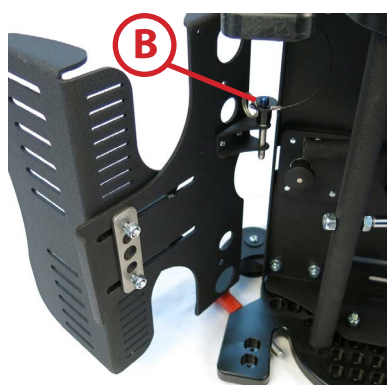

Inclinazione della pedana

Allentare di qualche giro la manopola a farfalla (**A**) fino a sbloccare il meccanismo di sollevamento del poggiatesta. Posizionare il poggiatesta orizzontalmente e stringere nuovamente la manopola a farfalla.

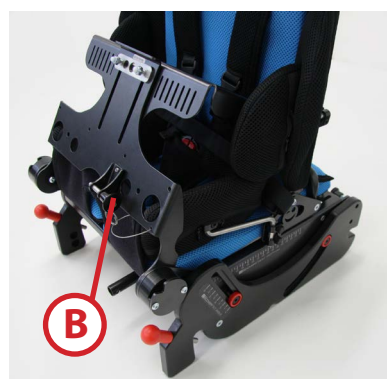

Sgancio del meccanismo di inclinazione della pedana

Inclinare orizzontalmente il poggiatesta e rimuovere il perno di bloccaggio (**B**) premendo il pulsante sul perno.

Far ruotare il poggiatesta verso l'alto fino a quando non si appoggia sulla seduta.

Per riposizionare il poggiatesta, allineare il poggiatesta con il meccanismo di inclinazione e far scorrere il perno di bloccaggio (**B**) sul poggiatesta mentre si preme il pulsante sul perno.



AVVERTENZA

Prestare attenzione quando si riposiziona la pedana per evitare possibili punti di schiacciamento delle dita.

Avvertenze



AVVERTENZA

Posizionare lo Shuttle Discovery e la seduta Discovery rivolto in avanti se utilizzato come seduta in un veicolo a motore.



AVVERTENZA

Trasferire il bambino sul seggiolino auto e utilizzare i sistemi di ritenuta installati dal costruttore del veicolo ogni volta che sia possibile. Conservare lo Shuttle Discovery non in uso nel bagagliaio o fissarlo nel veicolo durante il viaggio.



AVVERTENZA

Utilizzare i sistemi di ritenuta delle cinture di sicurezza pelviche e delle spalle per ridurre la possibilità di urto della testa e del tronco con i componenti del veicolo in caso di incidente stradale.



AVVERTENZA

Rimuovere e fissare il tavolino separatamente nel veicolo per ridurre il rischio di lesioni per il bambino.



AVVERTENZA

Non affidarsi a supporti posturali per il contenimento del bambino in un veicolo in movimento. Fare riferimento all'immagine e all'uso della cintura pelvica.




AVVERTENZA

Non utilizzare lo Shuttle Discovery dopo il coinvolgimento in qualsiasi tipo di incidente stradale.



AVVERTENZA

Non apportare modifiche o sostituzioni ai punti di fissaggio della base Verve o al telaio.

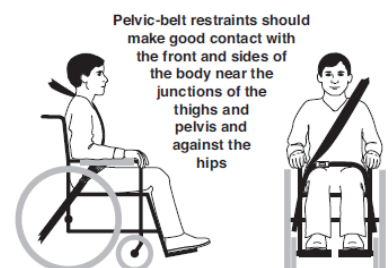

AVVERTENZA

Durante l'applicazione del sistema di ritenuta per occupanti, fare attenzione a posizionare la fibbia della cintura di sicurezza in modo che il pulsante di rilascio non entri in contatto con i componenti della seduta Discovery durante un incidente.



AVVERTENZA

La portata massima della seduta di 25 kg non deve essere superata.

Fissaggio dello Shuttle Discovery per il Trasporto



Prendere nota della posizione dei punti di fissaggio anteriore (A) e posteriore (B) sullo Shuttle Discovery. I punti sono inoltre chiaramente contrassegnati da un'etichetta.



AVVERTENZA

Utilizzare solo sistemi di ritenuta a 4 punti omologati in base alle seguenti norme:

ISO 10542-2. Utilizzare solo sistemi di ritenuta per sedie a rotelle e sistemi di ritenuta degli occupanti contrassegnati, testati secondo la normativa ISO 10542-1 o conformi la norma ISO 10542-1.

Fissare le cinture di ritenuta a 4 punti della sedia a rotelle secondo le istruzioni del produttore della cinghia.



L'angolo della cintura pelvica deve trovarsi all'interno della zona preferenziale di 45-75 gradi in orizzontale, o all'interno della zona opzionale di 30-45 gradi rispetto all'orizzontale.

La cintura pelvica deve essere indossata dal basso nella parte anteriore del bacino. Posizionare le cinture del tronco superiore sulle spalle. Le cinture non devono essere tenute lontane dal corpo dai componenti dello Shuttle Discovery. Assicurarsi che le cinture non siano attorcigliate.

Fissare tutte le cinture di sicurezza per gli occupanti secondo le istruzioni del produttore. Attorno all'occupante della sedia a rotelle deve essere previsto spazio libero sufficiente per spostamenti in avanti e all'indietro.


L'immagine a sinistra mostra quanto segue:

La zona libera posteriore viene misurata dal punto più arretrato della testa di un occupante. La zona libera anteriore viene misurata dal punto più avanzato della testa di un occupante. L'altezza della testa in posizione seduta varia da circa 1200 mm per una donna piccola a circa 1550 mm per un maschio alto.

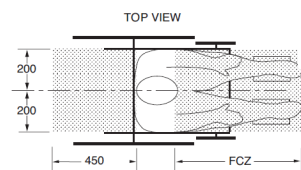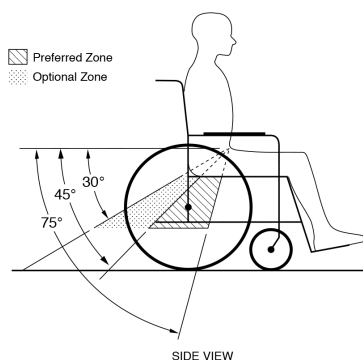

NOTES: The rear clear zone is measured from the rearmost point on an occupant's head. The front clear zone is measured from the foremost point on an occupant's head.

Seated head height (HHT) ranges from about 1200 mm for a small adult female to about 1550 mm for a tall adult male.

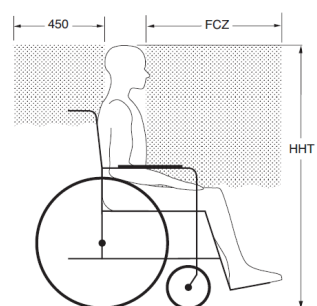

FCZ = 650 mm with upper torso restraint
= 950 mm with only pelvic restraint

NOTE: It is strongly recommended that both pelvic and upper-torso belts be used.

Zona libera anteriore

= 650 mm con ritenuta della parte superiore del tronco
= 950 mm con il solo contenimento pelvico.

Devono essere utilizzate sia la cintura pelvica che quella del tronco.



AVVERTENZA

1. **Utilizzare lo Shuttle Discovery con la base Verve (con staffe di fissaggio in dotazione) solo per il trasporto in auto** Vedi pag. 18.
2. **Non utilizzare il Discovery Seat con altre basi per il trasporto.** Utilizzare solo la base Verve.
3. **Non utilizzare la seduta Discovery come seggiolino per auto.**
4. **Il cestino alla base dello Shuttle Discovery deve essere svuotato prima dell'uso nel trasporto del veicolo.**

Staffe di fissaggio


Questa pagina è rilevante per tutti i paesi al di fuori degli Stati Uniti d'America. Il montaggio delle staffe di fissaggio deve essere eseguito da un tecnico competente.

Negli Stati Uniti queste staffe vengono fornite solo preinstallate.

Montaggio della staffa di fissaggio anteriore

Rimuovere il distanziale della piastra di fissaggio e sostituirlo con la piastra di fissaggio (D).

- (A) Barra di montaggio anteriore
- (B) Vite con testa a bottone
- (C) Distanziatore telaio anteriore
- (D) Piastra di fissaggio anteriore
- (E) Viti a testa svasata
- (F) Rondella piatta
- (G) Dado cieco a calotta

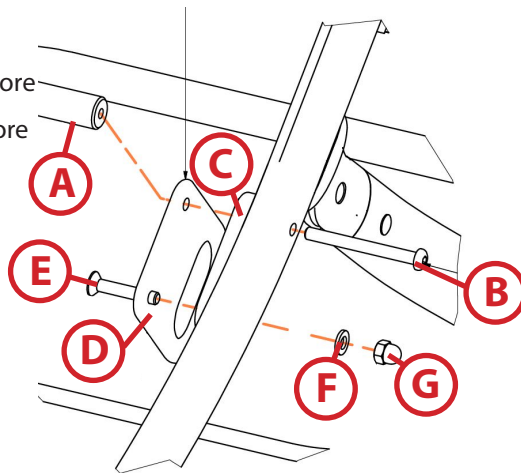


Assicurarsi che la coppia di serraggio di tutti gli elementi di fissaggio siano serrati a 5 Nm (44 lb-in) una volta installati.



Montaggio della staffa di fissaggio posteriore

- (H) Piastra di fissaggio posteriore della base Verve
- (I) Vite a testa tonda - 30 mm
- (J) Vite a testa tonda - 25 mm
- (K) Morsetto interno posteriore della base Verve
- (L) Morsetto esterno posteriore della base Verve.

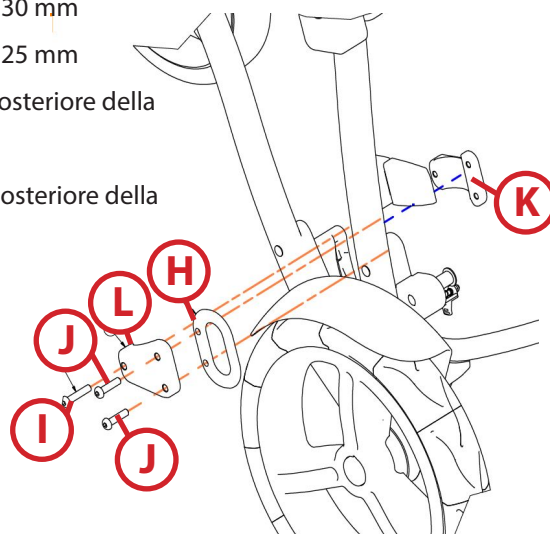


Assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati a 5 Nm (44 lb-in) una volta installati.



AVVERTENZA

Assicurarsi che i dispositivi di fissaggio siano controllati in accordo con i controlli di manutenzione semestrali. Il montaggio non corretto delle staffe di fissaggio può causare gravi lesioni o morte al bambino o ad altre persone in caso di incidente.

Fissaggio della seduta Discovery per il trasporto

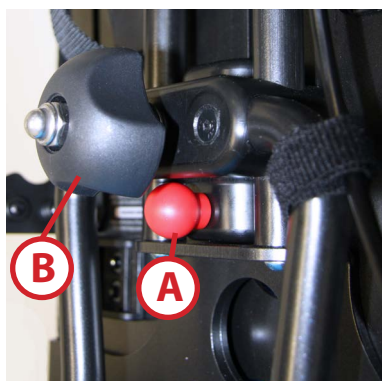

Angolo dello schienale

Quando si utilizza la seduta Discovery per il trasporto su veicoli a motore, è fondamentale che lo schienale sia bloccato in posizione verticale, con il pistoncino inserito nel foro inferiore dello schienale.

Per bloccare lo schienale

Posizionare lo schienale a 90 gradi rispetto alla seduta allentando la manopola (B) e inclinando lo schienale in avanti. Tirare il pistoncino (A) mentre si sta inclinando lo schienale. Rilasciare per agganciare il foro inferiore quando lo schienale è a 90 gradi.

Controllare che il pistoncino sia inserito, quindi stringere la manopola di regolazione dell'angolo (B).



**BLOCCATO IN
POSIZIONE DI
TRASPORTO**



AVVERTENZA

Se lo schienale non viene fissato in posizione verticale potrebbe muoversi e, in caso di incidente, causare gravi lesioni o la morte del bambino o di altre persone.

Basculazione della seduta

Quando si utilizza la seduta Discovery per il trasporto in veicoli a motore, la seduta deve essere inclinata all'indietro e i pistoncini di sicurezza (C) bloccati nei fori per il trasporto a 10 gradi evidenziati dall'etichetta di avvertenza.

Per bloccare l'inclinazione della seduta

Tirare i pistoncini (C), ruotare di 30 gradi e rilasciare per inserire i perni. Premere la leva di azionamento di basculazione (D) e inclinare l'intera seduta fino a quando entrambi i pistoncini di sicurezza (C) si inseriscono nel foro di trasporto inferiore. Rilasciare la leva di azionamento (D).



AVVERTENZA

Il mancato inserimento dei pistoncini di sicurezza per bloccare la basculazione consente di inclinare liberamente l'intera seduta e, in caso di incidente, può causare gravi lesioni o la morte del bambino o di altre persone.



Imbracatura di sicurezza a 5 punti, con cinture pelviche a 2 e 4 punti

È consigliabile che ogni volta che si utilizza la seduta Discovery, si esamini la cintura pelvica per accertarsi che la sia saldamente fissata e che non vi siano segni visibili di usura delle cinture.

Regolare nuovamente le cinture per consentire il cambio di vestiti.

Prestare particolare attenzione alle seguenti avvertenze relative all'uso sicuro dell'imbracatura di sicurezza a 5 punti e delle cinture pelviche a 2 e 4 punti.




AVVERTENZE

1. Assicurarsi che ci sia almeno uno spazio di due dita tra il bambino e le cinture pelviche, in modo che la cintura pelvica non sia troppo stretta.
2. Cinture pelviche collocate in modo non corretto possono far sì che il bambino scivoli verso il basso sulla seduta, il che potrebbe causare asfissia provocata dalle cinture stesse.
3. Controllare che la cintura pelvica passi sotto il supporto pelvico e che sia disposta perfettamente in ogni momento per mantenere una corretta posizione di seduta.
4. Contattare Medifab e/o il fornitore di ausili medici dell'utilizzatore se non si è sicuri su come utilizzare la cintura pelvica. Non utilizzare se le cinture risultano danneggiate o non saldamente fissate.
5. Mantenere le cinture pulite, in quanto sarà difficile regolare cinture arrotolate.
6. Ispezionare spesso le cinture per accertarsi che non si siano allentate.
7. Non permettere al bambino di sganciare la fibbia. Se il bambino è in grado di sganciare la fibbia, contattare il fornitore di ausili medici per ricevere istruzioni su come evitare che il bambino possa sganciare la fibbia, in quanto ciò potrebbe essere pericoloso.

Montaggio delle cinture per le spalle

Far passare ciascuna delle cinture per le spalle attraverso le apposite fessure dell'imbottitura dello schienale e dello schienale in metallo **(A)**. Fissare le cinture nelle due fibbie a ribalta situate sullo schienale **(B)**.

La lunghezza delle cinghie delle spalle può essere regolata con le due fibbie a ribalta **(B)**.

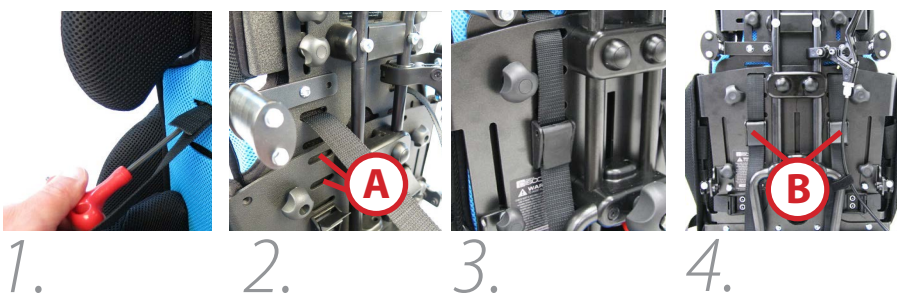

Montaggio della cintura inguinale

Inserire la cintura inguinale fissata alla fibbia a 5 punti di ritenuta attraverso l'imbottitura del seduta nella fessura nella base metallica del seduta **(C)**.

Fissare la cintura nella fibbia a ribalta **(D)** situata sotto la base metallica del seduta. La posizione della fibbia a 5 punti può essere regolata con la fibbia a ribalta **(D)**.






Montaggio della cintura pelvica

Far passare la cintura pelvica attraverso la fessura **(A)** nella staffa di profondità della seduta **(B)**.

Fissare le cinture con la fibbia passante (raffigurata nell'immagine a destra).



Fibbia passante

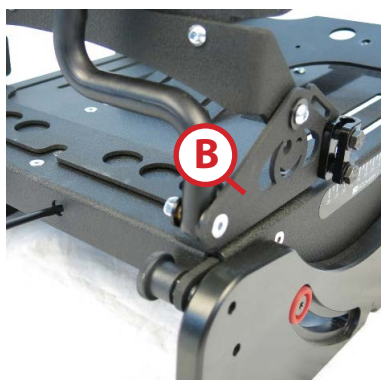

Regolazione della cintura pelvica

La lunghezza delle cinture pelviche può essere regolata con la fibbia passante (mostrata nell'immagine a destra) e la lunghezza della cintura attraverso la fessura situata sulla staffa di profondità della seduta.



Assicurarsi che la cintura pelvica sia alimentata saldamente attraverso la fibbia passante come mostrato nella figura.



1.

2.

3.

4.



Fissaggio della cintura pelvica

Spingere insieme le parti maschio e femmina della fibbia di sgancio laterale. Per sganciare la fibbia, premere i due pulsanti laterali di sblocco.

Fissaggio dell'imbracatura a 5 punti

UK e UE - Fibbia a 5 punti



Unire le due parti maschio della fibbia insieme e quindi far scorrere il gruppo nella fibbia principale a 5 punti.

Assicurarsi che le due fibbie maschio scattino saldamente nella fibbia principale. Per sganciare le cinture, premere prima il sistema di blocco di sicurezza rosso **(A)** e poi i 2 pulsanti laterali **(B)**.

NZ, AU e USA

Far scorrere la singola fibbia maschio nella fibbia a 5 punti. Assicurarsi che le due fibbie maschio scattino saldamente nella fibbia principale. È essenziale che le cinture siano regolate/tese correttamente per quanto riguarda l'utilizzatore e che tutte le fibbie a ribalta siano inserite correttamente.

Si prega di fare riferimento alla sezione relativa alla regolazione dell'imbracatura a 5 punti nella pagina precedente.

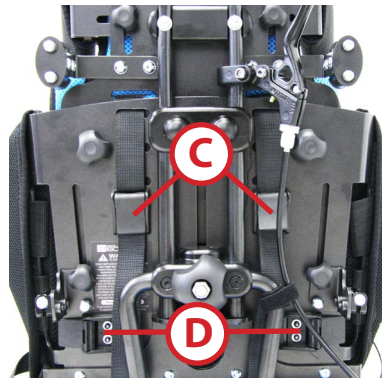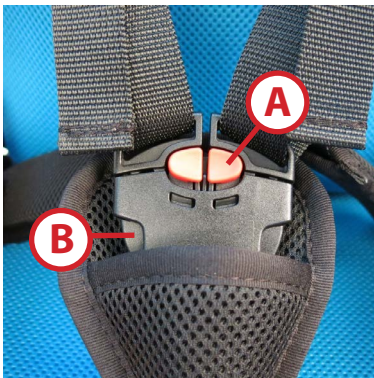

Fissaggio dell'imbracatura a 5 punti per i bambini

Inserire la cintura inguinale fissata all'imbottitura a T attraverso l'imbottitura della seduta nella fessura nella base metallica della seduta. Fissare la cintura nella fibbia a ribalta situata sotto la base metallica della seduta.

Far passare ciascuna delle cinture per le spalle attraverso le apposite fessure dell'imbottitura e dello schienale in metallo.

Fissare le cinture nelle due fibbie a ribalta **(C)** situate sullo schienale. Far passare la cintura pelvica attraverso la fessura nella staffa di profondità seduta.

Fissare le cinture con la fibbia passante (raffigurata nell'immagine a destra).



Stabilizzatore con punto di attacco centrale XS

Far passare ciascuna delle cinture superiori per le spalle attraverso le apposite fessure dell'imbottitura e dello schienale in metallo.

Fissare le cinture nelle due fibbie a ribalta situate sullo schienale. Fissare le cinture delle spalle nelle chiusure a ribalta superiori **(C)** e le cinture inferiori nelle chiusure a ribalta inferiori sullo schienale **(D)**.








Montaggio dello stabilizzatore pettorale

Far passare ciascuna delle cinture per le spalle attraverso le apposite fessure dell'imbottitura e dello schienale in metallo (A).

Fissare le cinture per le spalle nelle due fibbie a ribalta situate sullo schienale.

Inserire le cinture inferiori attraverso le fessure laterali dello schienale nella fibbia a ribalta (C).

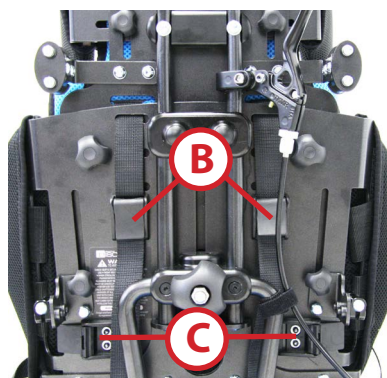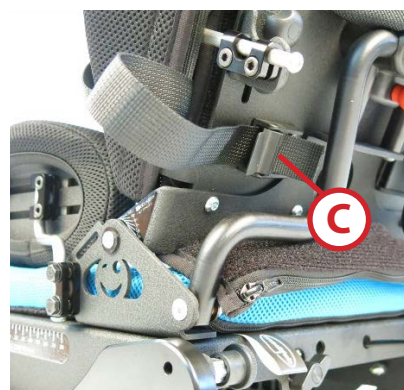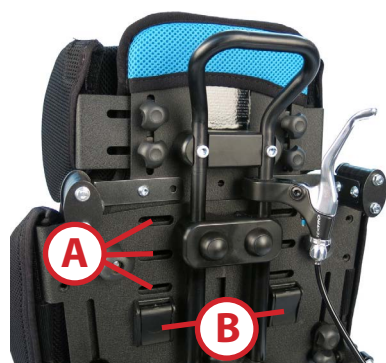

Regolazione dello stabilizzatore

La lunghezza delle cinture delle spalle può essere regolata con le due fibbie a ribalta situate sulla parte posteriore dello schienale (C).

La lunghezza delle cinture inferiori può essere regolata con le due fibbie a ribalta situate sulla parte posteriore dello schienale (C).

Il corretto montaggio dello stabilizzatore si ottiene quando lo stabilizzatore si adatta perfettamente al corpo del bambino e le mani dell'operatore possono essere inserite tra la spalla e le cinture.

Fissaggio dello stabilizzatore pettorale

Spingere la fibbia maschio sulle cinture nelle parti femmine delle fibbie situate sul dorsale. Per sganciare la fibbia, premere il pulsante di rilascio.




AVVERTENZE

1. Accertarsi che lo stabilizzatore non infastidisca la gola con rischio di soffocamento.
2. Fare attenzione che il bambino non si inclini in avanti o scivoli lungo la seduta, potrebbe potenzialmente asfissarsi a causa dello stabilizzatore.
3. Allentare sempre lo stabilizzatore partendo dalle bretelle.
4. Assicurarsi che la posizione e le dimensioni dello stabilizzatore siano riviste mensilmente per assicurarsi che risulti correttamente montato e adattato al bambino.
5. Controllare regolarmente l'usura dello stabilizzatore, in particolare le cuciture della fettuccia.

Montaggio della staffa

Fissare le due staffe per le cinture delle cosce (**A**) alla base della seduta sulla guida interna. Inserire i 2 bulloni (**B**) sulla staffa e fissarli con dadi e rondelle.


(**C**) sotto la base della seduta. Posizionare la staffa come richiesto e stringere i dadi.

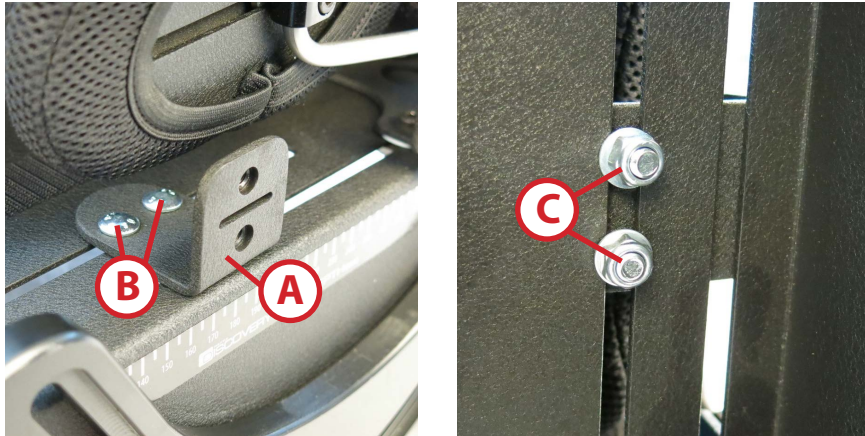

Regolazione delle cinture

Far passare la cintura pelvica attraverso la fessura (**C**) nelle staffe per le cinture delle cosce. Fissare le cinture attraverso la fibbia passante (**E**).

La lunghezza delle cinture del bacino e delle cosce può essere regolata attraverso le fibbie passanti (**E**). Assicurarsi che le cinture pelvica sia alimentata attraverso la fibbia passante.

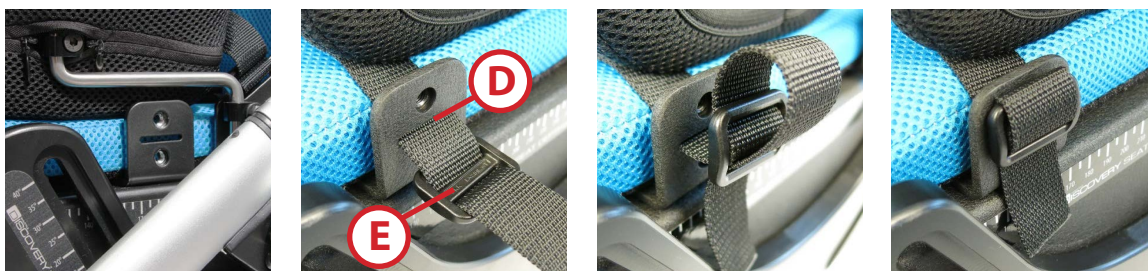

1.

2.

3.

4.


Montaggio della staffa per il divaricatore

La staffa di montaggio per il divaricatore è composta da una piastra scanalata **(A)**, 4 rondelle **(B - sottostanti)**, e una piastra del pistoncino **(C)**.

Inserire una sola vite **(D)** attraverso il foro nella base della seduta, far scorrere sulla piastra scanalata, inserire la rondella e infine stringere la vite **(D)** di qualche giro nella filettatura della piastra del pistone **(C)**. Non serrare la vite **(D)** in questa fase.

Avvitare il resto delle viti **(D)** senza dimenticare la rondella tra la piastra scanalata **(A)** e la piastra del pistone **(C)**.

Una volta che tutte le viti sono in posizione, serrare tutte e quattro le viti.

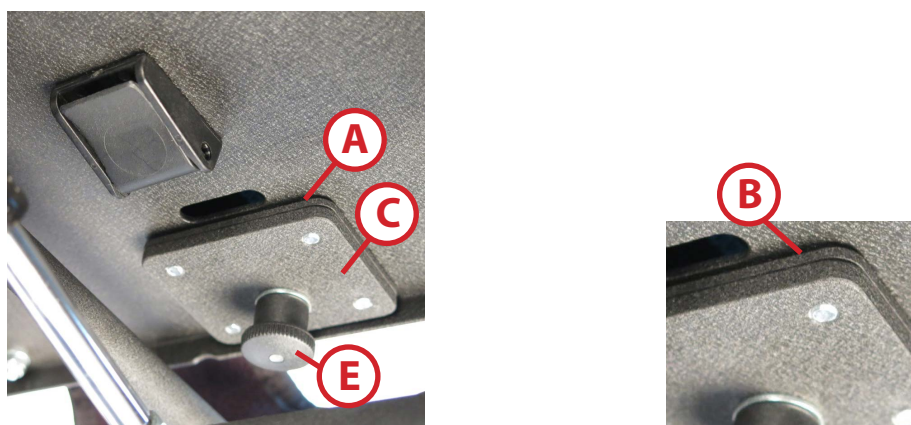

Montaggio del supporto per il divaricatore


Tirare il pistoncino **(E)** verso il basso dalla parte anteriore della seduta e far scorrere il supporto per il divaricatore **(F)** nella fessura della staffa **(G)**. Rilasciare il pistoncino **(E)** e assicurarsi che il pistoncino inserito e il supporto per il divaricatore **(F)** sia fisso.

Per rimuovere il supporto per il divaricatore, tirare il pistoncino verso il basso e far scorrere il supporto verso l'esterno.



AVVERTENZE



1. Prestare attenzione durante il montaggio del supporto per il divaricatore, poiché la staffa di angolazione del poggiatesta potrebbe rappresentare un rischio di schiacciamento delle dita.
2. Assicurarsi che tra l'inguine del bambino e il supporto per il divaricatore rimanga uno spazio di sicurezza.

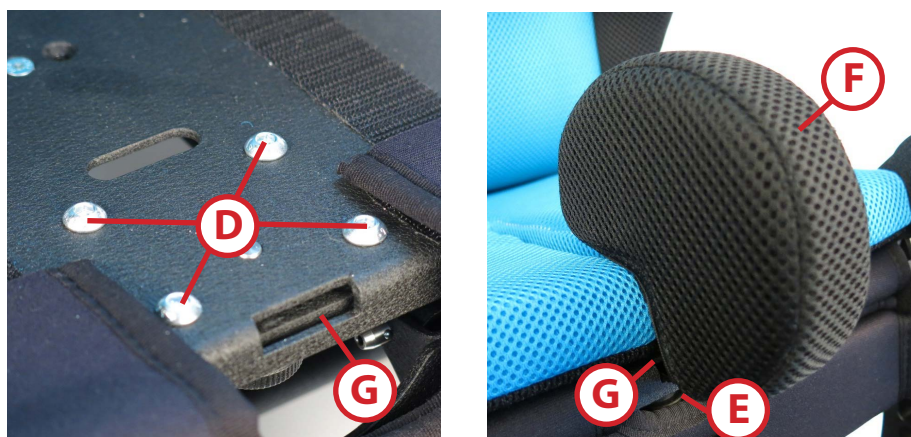

Guida indipendente per l'anca

Fissare le due staffe **(A)** alla base della seduta sulla guida interna.

Inserire i 2 bulloni **(B)** sulla staffa e fissarli con dadi e rondelle sotto la base della seduta. Posizionare la staffa come richiesto e stringere i dadi.

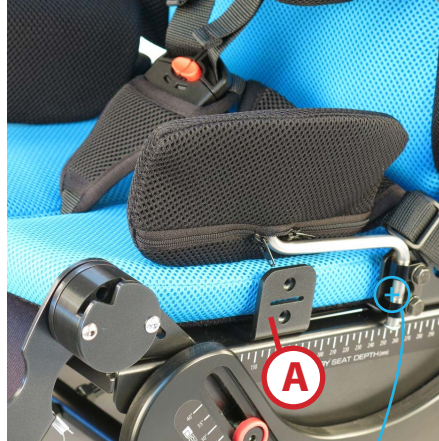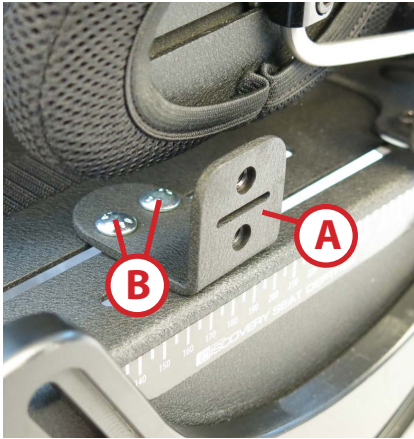

staffa ad
incastro

Fissaggio della guida per il bacino

Staccare la guida del bacino dallo schienale allentando completamente i bulloni e fissarla nuovamente alla staffa **(A)**. Seguire la stessa procedura per il lato opposto.

Guida del bacino/regolazione della larghezza della seduta


Allentare di qualche giro le due viti **(D)** e i due bulloni **(C)**. Ora è possibile regolare la larghezza, la profondità e l'angolo della guida del bacino.


Una volta raggiunta una posizione ottimale, serrare nuovamente viti **(D)** e bulloni **(C)**.

Per regolare le guide del bacino anteriore e posteriore allentare i bulloni **(B)**. Stringere le viti **(B)** dopo la regolazione.

N.B.:

Accertarsi che entrambe le guide del bacino siano al centro dello schienale.

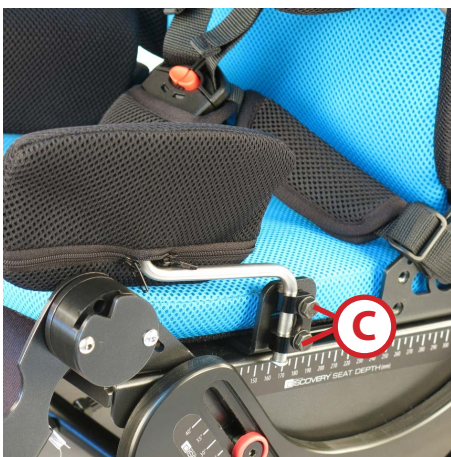


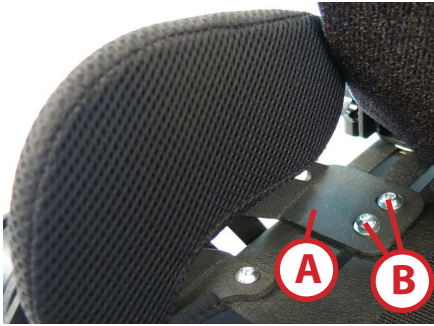

Montaggio dei supporti di adduzione


Fissare le due staffe di supporto per l'adduzione **(A)** alla base della seduta attraverso la fessura interna. Fissare le due viti **(B)** attraverso la fessura sulla seduta nella piastra di fissaggio.

Posizionare il supporto come richiesto e stringere le viti.

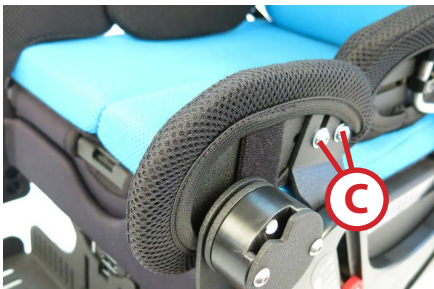

Regolazione dei supporti di adduzione

Allentare le 2 viti **(C)**, spostare il supporto nella posizione desiderata e stringere nuovamente.

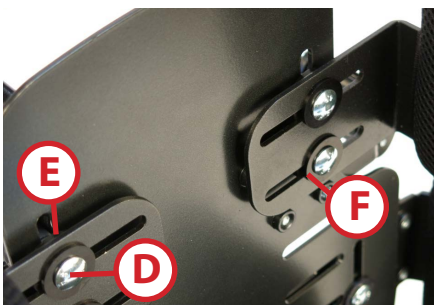

Fissaggio dei supporti laterali del capo

Rimuovere l'imbottitura dello schienale.

Utilizzando il bullone **(D)**, insieme alle rondelle **(F)** e **(E)**, fissare i supporti allo schienale attraverso le fessure. Le rondelle spesse **(E)** devono essere montate tra i supporti e lo schienale.

Fissare il bullone con la rondella **(G)** e la manopola **(H)**.

Montare allo stesso modo gli altri 3 bulloni.



Regolazione dei supporti laterali del capo

Allentare le manopole **(H)** di qualche giro, posizionare il supporto poggiatesta come desiderato e stringere nuovamente le manopole.

Montaggio asta portaflebo e portabombola di ossigeno

Gli elementi di montaggio possono essere fissati solo sulla parte posteriore sinistra della direzione di marcia sulla base Verve.


Sia l'asta portaflebo e portabombola di ossigeno devono essere montate sulla staffa (A) da fissare alla base Verve.

Rimuovere il perno Qstraint (B) e la vite a testa cilindrica M6 x 70 mm (C) e sostituirlo con vite a testa cilindrica M6 x 75 mm (D).

Montare liberamente il foro superiore nella staffa utilizzando la vite a testa cilindrica da 75 mm (D) e il perno Qstraint (B).

Montare l'estremità inferiore della staffa utilizzando i tiranti interni ed esterni posteriori. Morsetti (E) e (I) rispettivamente con la vite a testa tonda M6 x 35 mm sul foro anteriore e M6 x 30 mm sui fori posteriori.

Serrare tutti i bulloni/viti (compreso il perno (B)) una volta montati.

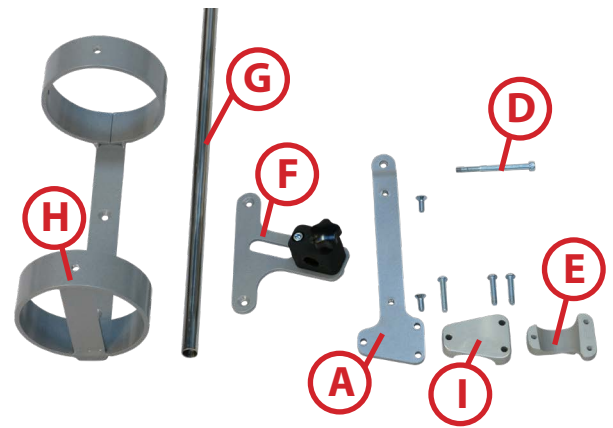**AVVERTENZE**

Assicurarsi che tutte le viti siano serrate saldamente.

*Sistema di montaggio dell'asta portaflebo*

Montare il sistema di fissaggio dell'asta portaflebo (F) sulla staffa di montaggio (A) utilizzando le viti a testa svasata M6 x 10 mm. Allentare la manopola del sistema di fissaggio dell'asta portaflebo (F) e inserire l'asta portaflebo (G) sulla staffa, fissarla all'altezza desiderata stringendo nuovamente e saldamente con la mano la manopola. Serrare saldamente le viti a testa svasata.

**AVVERTENZE**

Assicurarsi che tutte le viti siano serrate saldamente.

Assicurarsi che la manopola sia serrata saldamente per evitare che l'asta portaflebo scivoli.

*Sistema di montaggio del portabombola di ossigeno*

Montare il portabombola di ossigeno (H) sulla staffa di montaggio (A) utilizzando le viti a testa svasata M6 x 10 mm. Serrare saldamente le viti a testa svasata.

**AVVERTENZE**

Assicurarsi che tutte le viti siano serrate saldamente.

Assicurarsi che la manopola sia serrata saldamente per evitare che l'asta portaflebo scivoli.

*Sistema di montaggio dell'asta portaflebo e del portabombola di ossigeno*

Se sulla base Verve devono essere montati sia l'asta portaflebo che il portabombola di ossigeno, fissare il sistema di montaggio dell'asta portaflebo dietro il portabombola di ossigeno utilizzando le viti a testa svasata M6 x 15 mm al posto delle viti M6 x 10 mm.

**AVVERTENZE**

Assicurarsi che tutte le viti siano serrate saldamente.

Assicurarsi che la manopola sia serrata saldamente per evitare che l'asta portaflebo scivoli.



Fissaggio del cuneo per cosce

Posizionare il supporto a cuneo per le cosce sulla parte superiore della seduta e fissarlo con il velcro. L'imbottitura viene fissata con velcro sulla parte superiore del cuneo.



Fissaggio dei cunei per trocanteri

Posizionare i cunei per trocanteri sulla parte superiore della seduta e fissarli con il velcro. L'imbottitura viene fissata con velcro sulla parte superiore del cuneo.




Fissaggio dei cunei di protrazione delle spalle

Collocare i cunei di protrazione della spalla nella parte superiore del pannello dello schienale e fissarli con il velcro. L'imbottitura dello schienale viene fissata con velcro sulla parte superiore.



Fissaggio del cuscinetto sacrale


Collocare il cuscinetto sacrale sul fondo del pannello dello schienale e fissarlo con il velcro. L'imbottitura dello schienale viene fissata con velcro sulla parte superiore.

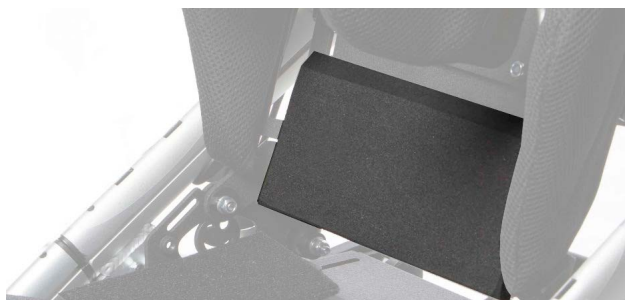

Cuscino Modulare

Codice 2006-0610-0xx (xx = codice colore)

Il cuscino modulare è progettato per soddisfare le esigenze di posizionamento pelvico troppo complesse per essere soddisfatte dal cuscino di seduta piatto e dai cunei che lo accompagnano.

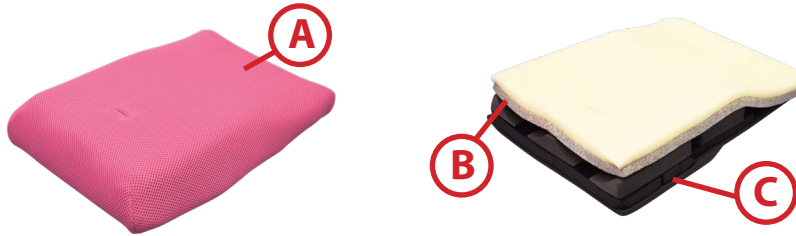


AVVERTENZA

L'interferenza con gli elementi di posizionamento modulari all'interno del cuscino può rappresentare un rischio per il bambino.

Per preparare il cuscino:


- Per preparare correttamente il cuscino, è necessario ottenere una serie di misurazioni accurate affinché la configurazione sia effettuata correttamente. Le misure che consigliamo sono le seguenti:
 - Profondità seduta / **Misura B** (Seduto il più dritto possibile / con inclinazione pelvica ottimale)
 - Larghezza seduta / **Misura A** (sia ai fianchi che alle cosce)
 - Posizione per il piano preischiatico / **Misura H** (normalmente questa è la linea della piega glutea, misurata dalla parte posteriore del cuscino)
- Togliere la fodera (**A**) e il rivestimento in schiuma (**B**) dal cuscino per scoprire gli elementi di posizionamento (**C**).
- Configurare il supporto preischiatico della coscia:
 - Utilizzare una combinazione di sezioni piatte spesse 20 mm per creare la profondità di sostegno necessaria per le cosce davanti alla zona ischiatica (Misura H).

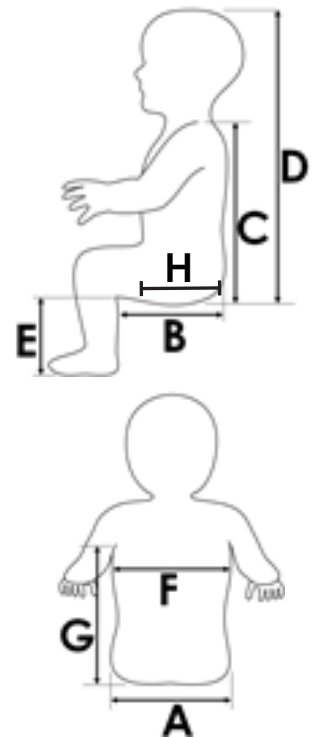

N.B.:

Una delle sezioni ha il bordo arrotondato (**D**). Questo deve essere utilizzato nella parte posteriore del piano preischiatico davanti all'area ischiatica (Misura H).

Alcune sezioni di questo elemento potrebbero non essere necessarie a causa della ridotta profondità di seduta. Queste dovrebbero essere conservate per essere inserite man mano che il bambino cresce.

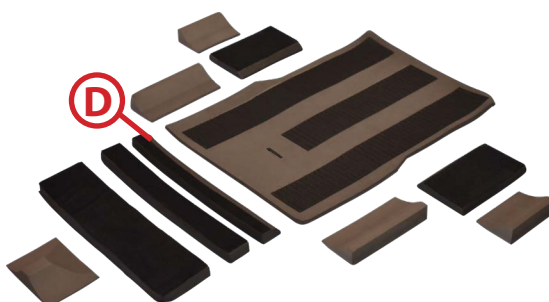

Cuscino Modulare

- 1. Aggiungere i cunei di sostegno del trocantere (testa del femore) (A):** sono posizionati direttamente dietro alla parte preischiatica (Misura H) per fornire stabilità e uno strumento di correzione/sostegno a un bacino con (obliquità pelvica). Regolare la larghezza tra i cunei in base alle esigenze del bambino. Uno dei due cunei può essere eliminato per risolvere problemi di (obliquità pelvica).
- 2. È richiesta l'aggiunta di cunei laterali (B) e divaricatore (C)** in alcuni casi può essere necessaria una modifica, come il restringimento dei cunei laterali (B) o della sommità del divaricatore (C). Utilizzare i cunei più corti dove è richiesta una minore profondità di seduta (misura B) - se necessario è possibile accorciare i cunei.
- 3. Montare il cuscino** - collocare il rivestimento in schiuma co il in tessuto sul lato inferiore così che si attacchi al pannello di base del cuscino. Inserire il tutto nella fodera in tessuto traspirante lavabile.
- 4. Installare sul telaio della seduta;** assicurarsi che sul pannello della seduta sia presente un sistema di aggancio per tenere in posizione il cuscino, allineare quindi la parte anteriore del cuscino sul pannello seduta di modo che sporga dal bordo di circa 10 mm.
- 5. Installare le staffe a Z sui supporti per le anche;** i supporti consentono di aumentare lo spessore del cuscino modulare. Rimuovere i dispositivi di fissaggio del cuscinetto dell'anca (D) e il punto di fissaggio (E) e sostituirli con la staffa a Z.



L'immagine sopra mostra il cuscino standard


Fissaggio della staffa di montaggio del tavolino

N.B.:

Il blocco di montaggio (A) è destro e sinistro. La fessura nel blocco di montaggio (B) dovrebbe essere rivolto verso il davanti.

Fissare il blocco di montaggio (A) e la piastra di arresto dell'altezza (D) alla staffa della cerniera del poggiatesta (C) utilizzando i bulloni (E).

Utilizzare una chiave a brugola da 3 mm e serrare i bulloni (E) a 1/4 di giro dopo averli stretti con le dita.

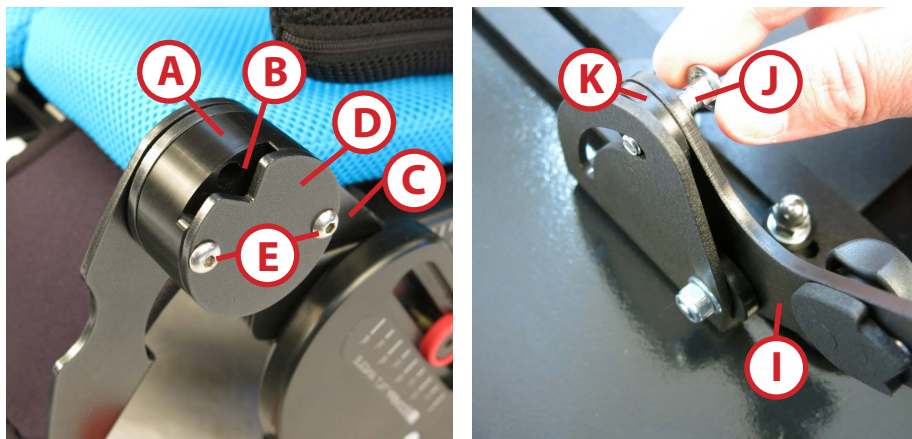


Montaggio del Tavolino


Posizionare il tavolino dritto e rimuovere la manopola (F), la rondella metallica (G) e la rondella di plastica sottile (H).

Estrarre il bullone (J) fino a quando il piede di regolazione dell'altezza (I) sia libero di ruotare verso l'alto. Ruotare il piedino di regolazione dell'altezza (I) fino a quando non sia in linea con la fessura curva. Spingere il bullone attraverso la fessura.

Far scorrere la rondella di plastica spessa (K), la rondella di plastica sottile (G) e la rondella metallica (F) sul bullone (J) nell'ordine mostrato nelle immagini. Fissare il gruppo con la manopola (F).

Seguire la stessa procedura per montare il piedino di regolazione in altezza del tavolino opposto (I).

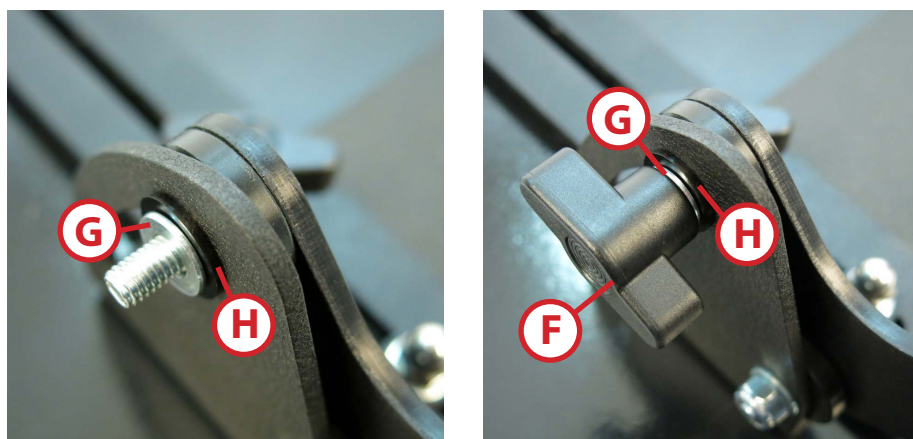

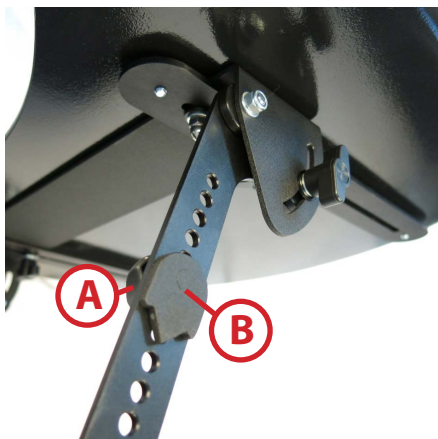

Regolazione dell'altezza del Tavolino


Svitare completamente la manopola **(A)**. Riposizionare l'arresto dell'altezza **(B)** e fissare di nuovo saldamente la manopola **(A)**.

N.B.:

Assicurarsi che l'arresto dell'altezza sia rivolto verso l'esterno e che la manopola sia rivolta verso l'interno.

N.B.:


Assicurarsi che i fermi dell'altezza siano posizionati parallelamente l'uno all'altro.

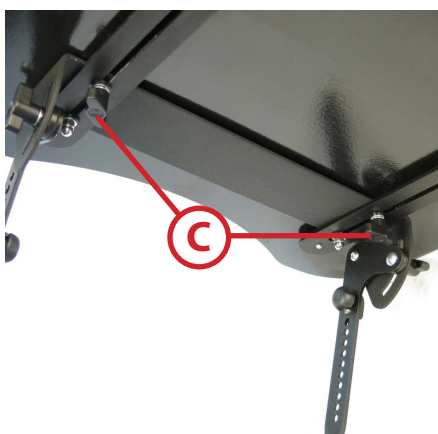

Regolazione della Profondità del Tavolino

Allentare le due manopole a farfalla **(C)** di qualche giro.

Far scorrere il tavolino alla profondità desiderata e serrare nuovamente le manopole **(C)**.

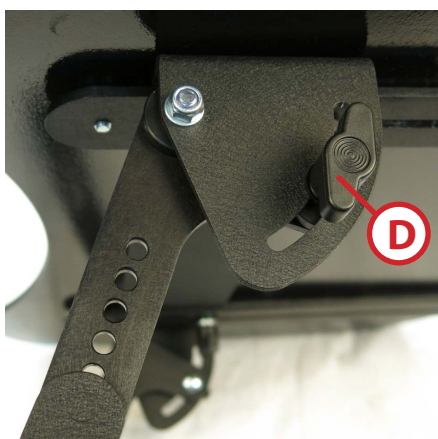

Regolazione dell'angolo del Tavolino

Allentare le due manopole a farfalla **(D)** di qualche giro.

Inclinare il tavolino con l'angolo desiderato e serrare nuovamente le manopole **(D)**.

Fissaggio del Tavolino


Far scorrere i piedini di regolazione dell'altezza del tavolino (A) nel blocco di montaggio del tavolino (B).

Accertarsi che i fermi dell'altezza del tavolino (C) siano posizionati nelle piastre di arresto del tavolino (D) e che il tavolino sia livellato.



AVVERTENZE

1. Assicurarsi che ci sia un piccolo spazio tra il bambino e il tavolino.
2. Non stringere troppo il tavolino contro il torace del bambino.
3. Assicurarsi che l'utilizzatore non incastri le braccia nel tavolino o sui lati del passeggino.
4. Non appoggiare oggetti pesanti sul tavolino.
5. Non portare il seggiolino usando il tavolino.
6. Prestare attenzione durante il montaggio del tavolino. Assicurarsi che le mani del bambino siano sollevate e non si trovino vicine ai fissaggi del tavolino in plastica in quanto vi è la possibilità di schiacciare le dita.

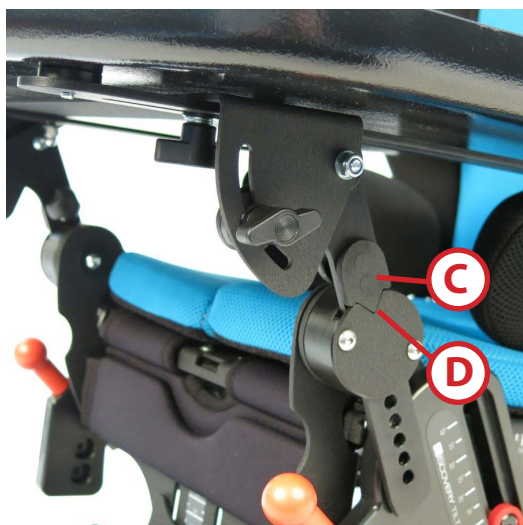



Montaggio del corrimano


Per prima cosa, sbloccare la leva di sblocco **(A)**, quindi far scorrere il corrimano sul bordo del tavolino.

Assicurarsi che la meccanismo di blocco **(B)** ruoti verso il basso per consentire alla guida di afferrare il bordo del tavolino.

Bloccare la leva **(A)** in posizione.

Regolazione del corrimano

Sbloccare la leva di sblocco **(A)**, quindi far scorrere il corrimano nella posizione desiderata per il bambino..

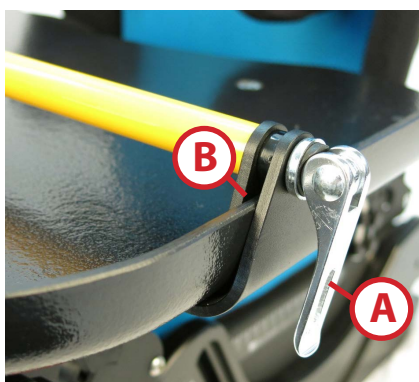

Accessorio nel cestino alla base per assistenza in patologie critiche

Accessorio per assistenza in patologie critiche si trova all'interno del cestino alla base del passeggino Verve. Posizionare i ganci sul tubo posteriore **(C)** e avvolgere le cinture sulla barra di fissaggio anteriore della base Verve **(D)**.

Fissare con le fibbie passanti (nell'immagine a destra) e regolare la lunghezza delle cinture per garantire che il tavolino sia livellato con il terreno. La portata massima del riferito accessorio del cestino è di 10 kg.



Per rimuovere

Sganciare le fibbie per staccare le cinture dalla barra di montaggio anteriore, e sollevare il tavolino estraendolo dalla base del passeggino.




AVVERTENZE

1. L'accessorio in questione deve essere rimosso prima del trasporto in un veicolo a motore.
2. Non superare il peso limite di 10 kg.

Montaggio delle cinture per piedi e caviglie

Far passare le cinture in velcro attraverso il poggiapiedi alla larghezza desiderata sul piede del bambino. Quindi unire le cinture **(A)** come mostrato sotto il poggiapiedi.

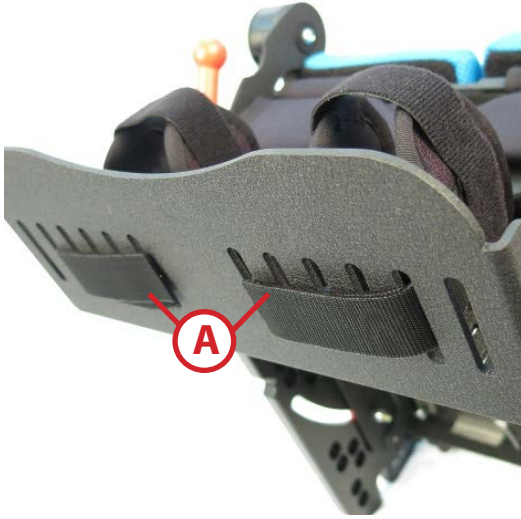

Protezione del poggiapiedi


Collocare l'imbottitura di protezione del poggiapiedi con il velcro come mostrato in figura.



Cuneo Dorsiflessione Poggiapiedi

Montare il cuneo di dorsiflessione con pendenza posteriore, ovvero con il bordo spesso **(B)** davanti e il bordo sottile **(C)** dietro.




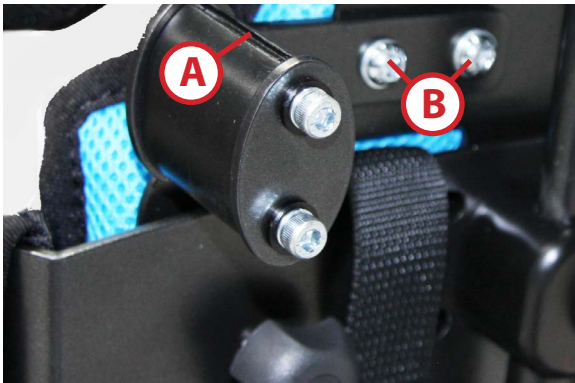

Fissaggio delle staffe per parasole

Montare le due staffe per il parasole sulla struttura dello schienale utilizzando le quattro viti M6 (B) e le rondelle elastiche.

Assicurarsi che la scanalatura (A) sulla plastica sia rivolta verso l'alto.

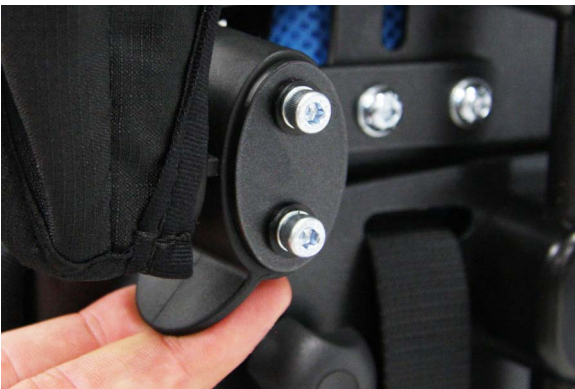

Installazione del parasole

Inserire i ganci del parasole sullastaffa di montaggio del parasole con il labbro (C) nella scanalatura (A).

Accertarsi che il gancio sia completamente incastrato in posizione.



Rimozione del parasole

Tirare la linguetta sul gancio del parasole per rimuoverlo.



Sacco termico

Rimuovere le cinture delle spalle e inguinale dallo Shuttle Discovery, posizionare le guide pelviche e toraciche rispettivamente all'interno delle fessure inferiore e superiore del sacco.

Stendere il sacco termico verso il basso (rimuovendo pieghe/rughe) per adattarlo alla sedia e offrire un comfort ottimale. Inserire le cinture pelviche attraverso la fessura inferiore insieme alle guide pelviche (D).

Far passare la cintura inguinale attraverso la fessura centrale (E), determinare la lunghezza ottimale della cinta delle spalle per l'utilizzatore e inserire attraverso le rispettive fessure superiori (F).

Il fissaggio delle cinghie alla sedia non cambia quando si utilizza uno Sacco Termico, vedi pagg. 32-35 per il fissaggio delle cinture/imbracature al seduta.



Base a dondolo Moon Rock

Installazione della seduta Discovery

Prima di installare la seduta Discovery sulla base a dondolo Moon Rock, innestare il meccanismo anti-dondolo. Posizionare la parte posteriore della seduta Discovery sulla Base Moon Rock.

Far scorrere la fessura posteriore del seduta sulla barra di montaggio posteriore (C) della base Moon Rock.

Abbassare la parte anteriore della seduta sulla barra di montaggio anteriore (D) della base Moon Rock. Assicurarsi che i perni di bloccaggio rossi (A) siano completamente innestati.



AVVERTENZE

1. Verificare sempre che i due pistoncini rossi di sicurezza siano inseriti e che la seduta sia fissata prima di utilizzarla.
2. Prestare attenzione alla lunghezza della base e all'ambiente circostante in cui la base Moon Rock viene utilizzata.
3. Per motivi di sicurezza la seduta può essere installata sulla base solo in un modo. La scanalatura (E) sul lato della seduta si innesta nella barra trasversale per fissarla.

Per agganciare le barre anti-dondolo

Estrarre le barre anti-dondolo (B). I meccanismi a molla bloccano le barre in posizione.

Per disinnestare la barra anti-dondolo

Spingere indietro le barre anti-dondolo fino a essere completamente raccolte.



AVVERTENZE

Prestare attenzione quando si tirano/spingono le barre anti-dondolo in quanto ci sono possibili punti di schiacciamento.





Rimozione della seduta Discovery

Prima di rimuovere la seduta Discovery dalla base a dondolo Moon Rock, innestare il meccanismo anti-dondolo.

Liberare i pistoncini rossi di sicurezza tirando le due manopole rosse **(A)**. Una volta che la parte anteriore del seggiolino è libera, reclinare lo schienale del seggiolino e rimuovere il seggiolino dalla barra di montaggio posteriore.

La mancata osservanza di queste istruzioni e avvertenze può causare lesioni gravi o la morte del bambino.



AVVERTENZE

1. Utilizzare sempre tutte le cinture di posizionamento in dotazione.
2. Mantenere sempre correttamente la seduta Discovery con entrambe le mani. In caso contrario, il seggiolino potrebbe cadere e causare danni.
3. Non installare o rimuovere mai la seduta Discovery con il bambino seduto sulla seduta.
4. Non permettere ad altre persone di usarlo, giocarci e salire, entrare o correre / giocare intorno alla base Moon Rock.
5. Permettere ad altri bambini di giocare vicino alla base Moon Rock può causare gravi lesioni a causa del movimento a dondolo della base.
6. Non appoggiarsi sulle barre trasversali posteriori o far oscillare in modo brusco la base a dondolo Moon Rock, in quanto ciò potrebbe causare la ribaltamento della base.
7. Utilizzare sempre la base Moon Rock su una superficie piana interna.
8. Il tavolino non è progettato per reggere il peso del bambino.



Base Interna Seduta (solo NZ e AU)

Per aprire la Base interna usare entrambe le mani per schiacciare le leve rosse **(B)**, farle scivolare verso il basso fino a quando le leve si reinseriscono entrambe. Assicurarsi che non possa essere regolato nuovamente senza premere le leve rosse **(B)**.

Non regolare mai l'altezza della base Seduta con l'utilizzatore seduto sul seduta Discovery. Per regolare l'altezza, usare entrambe le mani per premere le leve rosse **(C)** e far scorrere per regolare l'altezza. Rilasciare le leve e assicurarsi che entrambe si innestino e bloccano.

Per la sicurezza dell'operatore si consiglia che questo si inginocchi di fronte alla base del seduta e mantenere le spalle dritte mentre si regola l'altezza del seduta.

Assicurarsi che tutte le avvertenze di cui alle pagine 52 e 54 siano lette e comprese prima di utilizzare la base interna.



Base Hi-Lo

La base Hi-Lo può essere configurata con molla ad aria o attuatore elettrico.

Bloccaggio delle Ruote

Bloccare le rotelle premendo il freno (A) verso il basso (su ciascuno dei 4 angoli) e sollevare la base alla sua altezza massima.

Montaggio del Maniglione

Prima di montare la seduta Discovery sulla base Hi-Lo, installare il maniglione (B). Far scorrere il maniglione nel gancio del tubo fino al protezione terminale sulla barra trasversale, i fori di montaggio devono essere allineati.

Inserire la vite (C) e la vite (D) rispettivamente davanti e dietro, sul lato inferiore della base, e assicurarsi che siano serrate per fissare il maniglione.



Installazione della seduta Discovery

Posizionare la parte posteriore della seduta Discovery sulla base Hi-Lo. Far scorrere la fessura posteriore della seduta sulla barra di montaggio posteriore della base Hi-Lo.


Abbassare la parte anteriore della seduta sulla barra di montaggio anteriore (E) della base. I due pistoncini rossi di sicurezza (F) verranno autobloccati sulla barra di montaggio anteriore.



AVVERTENZE

1. Per motivi di sicurezza la seduta può essere installata sulla base solo in un modo. La scanalatura (G) sul lato della seduta si innesta nella barra trasversale per fissarlo.
2. Utilizzare sempre tutte le cinture di posizionamento in dotazione.
3. Prima di utilizzare la seduta, verificare sempre che i due pistoncini rossi di sicurezza siano inseriti e che la seduta sia ben ferma.
4. Prestare attenzione alla lunghezza della base e all'ambientecircostante in cui viene utilizzata.
5. Non permettere ad altre persone di usarla, giocarci e salire sopra, entrare dentro o correre / giocare in giro o sotto la base.
6. Non consentire all'utilizzatore finale o ad altri bambini di utilizzare le funzionalità di regolazione elettrica dell'altezza.
7. Utilizzare sempre la base su una superficie piana interna.
8. Bloccare sempre le 4 rotelle (A) quando si usa la base.
9. Si consiglia di utilizzare un tavolino quando si utilizza la base Hi-Lo, a meno che la base non venga utilizzata ad un tavolo.
10. Bloccare sempre le rotelle prima di montare la seduta Discovery sulla base Hi-Lo.
11. La staffa di montaggio centrale per gli attuatori è molto vicina al suolo. Prestare attenzione quando si percorrono superfici/rampe irregolari o quando si urta nel salire/scendere poiché può graffiare la superficie sottostante.



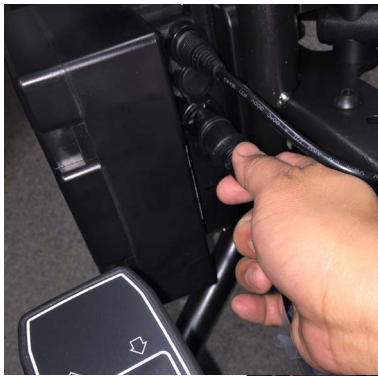

Regolazione dell'altezza - Versione elettrica

Collegare il comando ruotando la base Hi Lo su un lato e inserendo il cavo di alimentazione nella centralina di controllo come mostrato nella figura.

Utilizzare il telecomando per regolare l'altezza della base Hi-Lo. La seduta Discovery può essere regolato in altezza con l'utilizzatore seduto sulla seduta. Quando si abbassa la base, assicurarsi che il poggiatesta si trovi sempre ad almeno una distanza di 25 mm dal suolo. Conservare sempre il portatile sulla maniglia di spinta o lontano dalla portata dell'utilizzatore finale.

Prima di utilizzare la base elettrica Hi-Lo per la prima volta, caricare le batterie durante 24 ore per ottenere il corretto funzionamento e aumentare la durata della batteria.

Per caricare le batterie, collegare il caricabatterie alla rete elettrica e collegare il cavo del caricabatterie al telecomando. Il LED verde appare quando il caricabatterie è acceso, il LED giallo durante la ricarica.

Quando è in carica, spegnere l'alimentazione di rete e rimuovere il cavo del caricabatterie dal telecomando.

Le batterie dovrebbero essere caricate per 30 minuti o un'ora alla fine di ogni giornata per mantenere una durata ottimale.

Un segnale acustico del telecomando indica che la batteria è scarica e quindi deve essere ricaricate immediatamente.



Regolazione dell'altezza - Versione azionata ad aria

Prima di regolare l'altezza nella versione ad aria, bloccare tutte e quattro le rotelle come descritto sopra.

Elevazione della seduta

Sbloccare il pistoncino di sicurezza (A) situato sul lato sinistro del pedale (B) tirando la testa del pistoncino (A) e ruotandolo di un quarto di giro. In questo modo il pedale sarà operativo.

Premere il pedale mentre si tiene premuto il maniglione di spinta. Rimuovere il piede dal pedale per bloccare la base all'altezza desiderata.

A seconda del peso del bambino, potrebbe essere necessario aiutare a sollevare la seduta all'altezza desiderata. Ruotare la testa del pistoncino di sicurezza di un quarto di giro per bloccare il pedale.

Abbassamento della seduta


Sbloccare il pistoncino di sicurezza del pedale. Premere il pedale verso il basso e spingere verso il basso sul maniglione di spinta per abbassare la base.

Rimuovere il piede dal pedale per bloccare la base all'altezza desiderata. Ruotare la testa del pistoncino di sicurezza di un quarto di giro per bloccare il pedale.

Per assicurare una regolazione in altezza della base senza intoppi, premere delicatamente il pedale, mantenere il maniglione di spinta e informare l'utilizzatore della propria intenzione di regolare l'altezza del seduta per assicurarsi che l'utilizzatore non si spaventi a causa dei movimenti improvvisi.

Tenere sempre il pedale bloccato quando non viene utilizzato. Il pedale bloccato impedisce la regolazione accidentale dell'altezza.

Quando si abbassa la base, assicurarsi che il poggiatesta si trovi sempre ad almeno una distanza di 25 mm dal suolo.

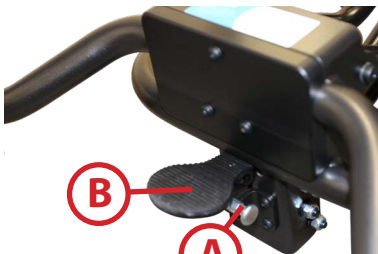

**AVVERTENZE**

1. Accertarsi che la seduta venga fissata e bloccata nella scanalatura angolare prima di sedere il bambino nella seduta.
2. Bloccare sempre le rotelle quando la base Hi-Lo è in uso.
3. Prestare sempre attenzione soprattutto quando la seduta è in posizione rialzata.
4. Quando si effettua un trasferimento con sollevamento, assicurarsi che l'imbracatura di sollevamento non sia impigliata in nessuna parte della seduta Discovery o della base.
5. Prima di spostare la base, assicurarsi che tutti i freni siano sbloccati e che il poggiatesta si trovi ad almeno 25 mm dal livello del suolo.
6. Quando si regola la seduta Discovery sulla base Hi-Lo sotto un tavolo, assicurarsi che tra le cosce del bambino e la parte inferiore del tavolo vi sia spazio sufficiente. Non lasciare la base Hi-Lo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo.
7. Durante l'abbassamento della base Hi-Lo, assicurarsi che il poggiatesta non entri in contatto con il pavimento. Se la base elettrica entra in contatto con il pavimento c'è la possibilità che la parte anteriore della base si sollevino, danneggiando il poggiatesta e causando lesioni all'utilizzatore.
8. Bloccare sempre il pedale con il pistoncino di sicurezza dopo aver regolato l'altezza (versione ad aria).
9. Dopo l'uso, riporre sempre il telecomando sul maniglione di spinta in un luogo sicuro.
10. La seduta può essere montata solo rivolta in avanti. Non provare a montarla rivolta all'indietro.
11. Non utilizzare la base elettrica se ci sono cavi elettrici esposti o se l'involucro di plastica dell'attuatore, della centralina di controllo, del telecomando, del caricabatterie di rete sono danneggiati.
12. Se un qualsiasi liquido entra in contatto con l'attuatore, la centralina, il telecomando, il caricabatterie o il cavo a spirale, asciugare accuratamente i componenti e testare il sistema prima di utilizzarlo. Se si sospetta che il liquido sia penetrato nei componenti o in caso di dubbio, non utilizzare la base alimentata elettricamente e contattare il proprio rivenditore per ulteriori consigli.
13. Quando si regola l'altezza della base, assicurarsi che non vi siano ostacoli, in quanto esiste il rischio di schiacciamento quando si abbassa la base.
14. Solo attuatore elettrico: non aprire nessuno dei componenti elettronici. Non superare il ciclo di carico di 2 min. di utilizzo continuo seguito da 18 min. di non utilizzo. Prestare attenzione a eventuali rumori o odori insoliti, fermarsi immediatamente e non utilizzare se si osserva qualcosa di insolito.

Rimozione della seduta Discovery


Prima di rimuovere la seduta Discovery dalla base Hi-Lo, le ruote devono essere bloccate.

Liberare i pistoncini rossi di sicurezza tirando le manopole rosse (A).

Una volta che la parte anteriore della seduta è libera, inclinare lo schienale e rimuovere la seduta dalla barra di montaggio posteriore.

**AVVERTENZE**

1. Mantenere sempre correttamente la seduta Discovery con entrambe le mani. In caso contrario, la seduta potrebbe cadere e causare danni.
2. Non installare o rimuovere mai la seduta Discovery con il bambino seduto sul seduto.

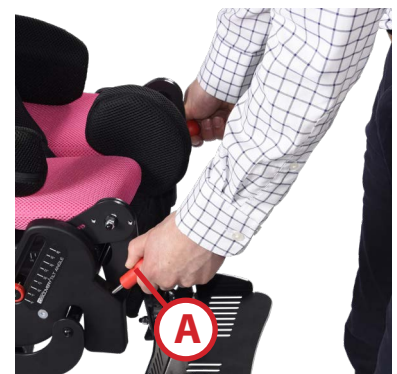

Base Lunar

Per motivi di sicurezza la seduta può essere installata sulla base solo in un modo. La scanalatura **(B)** sul lato del seduta si innesta nella barra trasversale per fissarla.




Installazione della seduta Discovery

Posizionare la parte posteriore della seduta Discovery sulla base Lunar. Far scorrere la fessura posteriore della seduta sulla barra di montaggio posteriore della base Lunar.

Abbassare la parte anteriore della seduta sulla barra di montaggio anteriore **(A)** della base Lunar.

**AVVERTENZE**

1. I due pistoncini rossi di sicurezza (C) devono essere autobloccati sulla barra di montaggio anteriore.
2. Verificare sempre che i due pistoncini rossi di sicurezza siano inseriti e che la seduta sia fissato prima di utilizzarlo.
3. Prestare attenzione alla lunghezza della base e all'ambiente circostante in cui viene utilizzata la Base Lunar.
4. Non permettere ad altre persone di usare, giocare, sostare, arrampicarsi o correre / giocare intorno alla Base Lunar.
5. Utilizzare sempre la Base Lunar su una superficie piana interna.
6. Utilizzare sempre tutte le cinture di posizionamento in dotazione.

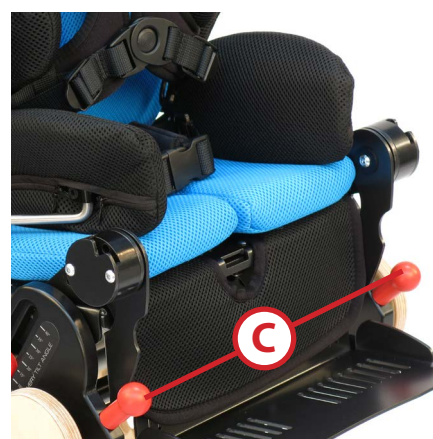

Regolazione dell'altezza

Per regolare l'altezza della Base Lunar, rimuovere le viti esterne **(A)** tenendo fermi i dadi a T **(B)** con l'altra chiave a brugola esagonale. Riposizionare la gamba all'altezza desiderata e serrare nuovamente le viti nei dadi a T **(B)**.



AVVERTENZE

1. Non regolare mai l'altezza della Base Lunar con il bambino seduto sulla seduta Discovery.
2. Assicurarsi che tutte e quattro le gambe siano livellate e fisse prima di inserire l'utilizzatore nella seduta Discovery.
3. Per facilitare la regolazione, si consiglia di regolare l'altezza della Base Lunar senza la seduta Discovery montata sulla Base Lunar.



Rimozione della seduta Discovery

Liberare i pistoncini rossi di sicurezza tirando le manopole rosse **(C)**. Una volta che la parte anteriore della seduta è libera, inclinare lo schienale e rimuovere la seduta dalla barra di montaggio posteriore.



AVVERTENZE

1. Mantenere sempre correttamente la seduta Discovery con entrambe le mani. In caso contrario, il seggiolino potrebbe cadere e causare danni.
2. Non installare o rimuovere mai la seduta Discovery con il bambino seduto sul seduto.



Protezione Antipioggia/Solare

Montare le protezioni Antipioggia/Solare fissando prima il parasole e poi drappeggiando la copertura sopra il parasole e sopra il manubrio.

Fissare la struttura utilizzando gli anelli in Velcro.



Seduta doppia/per fratelli



AVVERTENZE

Non superare la portata massima di 15 kg.

Installazione della seduta doppia/per fratelli

Allineare al telaio le linguette sotto la seduta e spingere leggermente verso il basso. Si sentirà uno scatto e la seduta si trova in posizione.

Controllare che la seduta sia ben fissata prima di utilizzarla e utilizzare tutte le cinture in dotazione.


Rimozione della seduta doppia/per fratelli

Individuare i due fermi **(A)** su entrambi i lati della seduta. Ruotare il fermo su entrambi i lati e sollevare la seduta.



AVVERTENZE

1. La seduta doppia/per fratelli deve essere rimossa prima di ripiegare il telaio della ase Verve.
2. La seduta doppia/per fratelli non è progettata e non deve essere usata o installata sullo Shuttle Discovery quando si utilizza Shuttle Discovery per il trasporto su veicoli a motore.

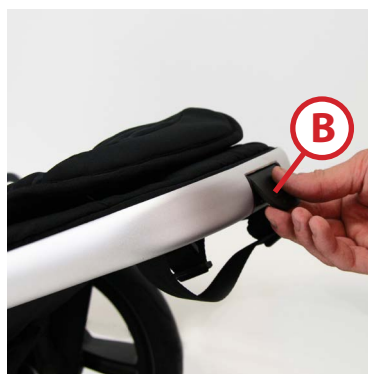

Angolo dello schienale

Per cambiare l'angolo dello schienale, sollevare la leva **(B)** situata sulla parte superiore dello schienale. Posizionare lo schienale in una delle tre posizioni previste e rilasciare la leva per bloccare l'angolo dello schienale.

Imbottitura e Rivestimenti in Tessuto

Pulizia giornaliera

L'imbottitura deve essere pulita regolarmente con acqua saponata o spray antibatterico. Si prega di asciugare accuratamente il materiale di copertura dopo la pulizia.

Pulizia profonda

I rivestimenti in tessuto possono essere lavati in lavatrice a 40 °C o scegliendo un programma con acqua calda. Togliere la schiuma dai rivestimenti prima di lavarli.



Per rimuovere i rivestimenti delle pelotte toracali, svitare prima le due viti **(A)** e staccare il supporto completo. Rimuovere le protezioni dalla schiuma preformata. Conservare gli elementi di fissaggio in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Per rimuovere il rivestimento dello schienale, è necessario rimuovere prima le cinture delle spalle. Sollevare la fibbia a ribalta **(B)** sul retro dello schienale e tirare la cintura attraverso l'imbottitura.

L'imbracatura a 5 punti, le cinture pelviche, le cinture per i piedi e lo stabilizzatore pettorale possono anche essere lavati in lavatrice a 40°C o scegliendo un programma con acqua calda. Assicurarsi che le cinture siano rimontate come indicato in questo manuale nella sezione Accessori: sezione relativa all'imbracatura di sicurezza a 5 punti e alle cinture pelviche.



Conservare le fibbie passanti di plastica (come mostrato nell'immagine a destra) in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Medifab consiglia di utilizzare salviette disinfettanti AHP (Perossido di idrogeno accelerato). Il prodotto disinfettante deve essere utilizzato secondo le istruzioni del produttore. Medifab non si assume alcuna responsabilità per l'efficacia del processo di disinfezione.

Componenti in metallo, plastica e legno

Pulizia giornaliera

Le parti in metallo, plastica e legno possono essere pulite con acqua saponata o spray antibatterico. Asciugare accuratamente il prodotto. NON utilizzare solventi, detersivi abrasivi, soda caustica, ipoclorito di sodio e solventi organici.




Prima di pulire la base Hi Lo, assicurarsi che la base sia nella posizione più bassa per evitare di rimuovere la pasta lubrificante dal pistone ad aria o dall'attuatore elettrico.

Non utilizzare uno spray ad alta pressione per pulire la base Hi Lo.

Pulizia profonda

Per la pulizia profonda può essere utilizzato anche un pulitore a vapore a bassa pressione. Si consiglia di pulire ogni sei mesi le ruote della base Verve.

Medifab consiglia di utilizzare salviette disinfettanti AHP (Perossido di idrogeno accelerato). Il prodotto disinfettante deve essere utilizzato secondo le istruzioni del produttore. Medifab non si assume alcuna responsabilità per l'efficacia del processo di disinfezione.

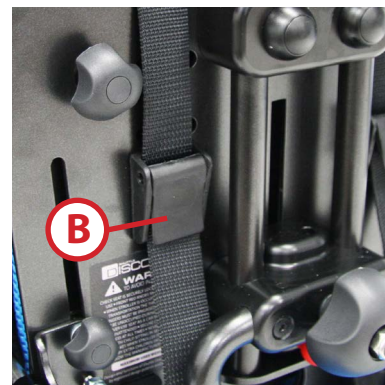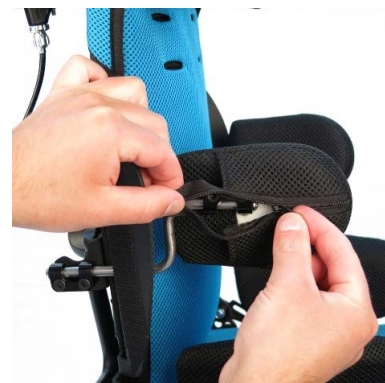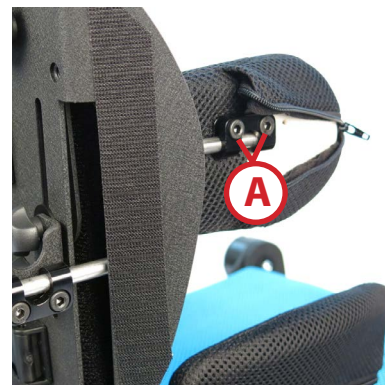

Rivendita del Prodotto

Prima di rivendere lo Shuttle Discovery devono essere osservati seguenti punti. Accertarsi che il prodotto sia standard e che non siano stati inseriti accessori o modifiche speciali. Assicurarsi che lo Shuttle Discovery soddisfi le esigenze del nuovo utilizzatore.

Ogni prodotto riporta un numero di serie. Non rimuovere questa etichetta.

Devono essere eseguiti controlli / ispezioni dettagliati sul prodotto da una persona tecnicamente competente che sia stata addestrata all'uso di questo prodotto. Seguire i controlli semestrali descritti alle pagine 60-62. Se non siete in grado di effettuare i controlli descritti, contattate Medifab o il vostro rivenditore locale, che sarà lieto di fornire un'assistenza completa al vostro Shuttle Discovery.

È necessario conservare un registro scritto di sei controlli mensili, servizi, riparazioni e configurazioni. Si prega di compilare il modulo di registrazione del prodotto sul retro di questo manuale.

Assicurarsi che lo Shuttle Discovery sia stato completamente pulito come riferito nel presente manuale.

Assicurarsi che venga sempre fornito un nuovo manuale di istruzioni ogni volta che il prodotto viene rivenduto. Per un nuovo manuale si prega di contattare Medifab o il rivenditore locale. È anche possibile scaricare il manuale dal nostro sito web: www.medifab.com o inviateci una a info@medifab.com.

Se il prodotto viene spedito, assicurarsi sempre che sia imballato in modo sicuro per evitare danni.

Manutenzione: controlli giornalieri

Prima di ogni utilizzo devono essere effettuati i seguenti controlli visivi.

Base Verve

- Controllare la base si stia muovendo senza intoppi e funzioni correttamente. Qualsiasi rumore, vibrazione o movimento insolito del prodotto può essere causato da elementi di fissaggio allentati o da danni al prodotto.
- Contattare il distributore dello Shuttle Discovery, il fornitore di ausili medici o Medifab caso fosse necessaria ulteriore assistenza, vi aiuteranno a correggere eventuali problemi.
- Controllare che il maniglione di spinta risulti ben fermo e che non ci sia spazio in corrispondenza del giunto pieghevole.
- Non utilizzare il prodotto fino a quando il problema non sarà stato risolto.

Seduta Discovery

- Controllare che l'imbracatura a 5 punti / le cinture pelviche a 4 punti e a 2 punti / imbracatura toracica siano saldamente fissate alla seduta.
- Controllare che l'angolo dello schienale sia fisso e serrato.
- Controllare che l'angolo e l'altezza del poggiatesta siano sicuri e stretti.
- Controllare che tutte le imbottiture non siano usurate.
- Controllare che tutte le leve e le manopole di regolazione siano in posizione e fissate.

Base Hi-Lo

- Verificare che la seduta Discovery sia montata saldamente sulla base Hi-Lo.
- Controllare che le rotelle siano saldamente bloccate.
- Controllare che la base Hi-Lo non sia usurata e che non vi siano usure o rotture.
- Controllare che non vi siano fili esposti sul telecomando.

Base a Dondolo Moon Rock

- Verificare che la seduta Discovery sia montata saldamente sulla base a dondolo Moon Rock.
- Verificare che le barre anti-dondolo siano entrambe bloccate.
- Controllare che il telaio non presenti usure, scheggiature o rotture.

Base Lunar

- Verificare che la seduta Discovery sia montata saldamente sulla Base Lunar.
- Controllare ciascuna delle quattro gambe per assicurarsi che siano ferme e livellate.
- Controllare che il telaio non presenti usure, scheggiature o rotture.



AVVERTENZE

1. Dopo aver trasferito il bambino su una qualsiasi delle basi, controllare che tutte le cinture di posizionamento si adattino perfettamente all'utilizzatore.
2. Mantenere sempre pulito il sistema Shuttle Discovery. Se siete stati in spiaggia, pulire completamente lo Shuttle Discovery per rimuovere la sabbia e il sale dai meccanismi e dalle ruote.

Manutenzione: controlli semestrali

La frequenza dei controlli semestrali è minima e deve essere regolata a seconda dell'ambiente in cui lo Shuttle Discovery viene utilizzato. Si consiglia di mantenere un registro dei controlli compilando il modulo di registrazione del prodotto alla fine di questo manuale.

Seduta Discovery

1. Controllare che l'imbracatura a 5 punti / le cinture pelviche a 4 punti e a 2 punti / imbracatura toracica siano saldamente fissate alla seduta e funzionino correttamente.
2. Controllare che i supporti dello schienale, toracico, pelvico, poggipiedi, poggiatesta, di abduzione o divaricatore, e di adduzione siano sicuri e ben saldi.
3. Controllare che l'angolo dello schienale sia fisso e serrato.
4. Controllare che il meccanismo di basculazione funzioni correttamente e che la seduta sia ben posizionata.
5. Controllare che la leva di rilascio della bascula azioni correttamente il meccanismo. Prestare particolare attenzione alla tensione del cavo, in modo che non sia troppo stretta in modo che possa inclinarsi senza azionare la leva di inclinazione.
6. Controllare che i pistoncini di sicurezza per il montaggio della seduta, l'angolo dello schienale e l'inclinazione nello spazio siano tutti fermi e bloccabili.
7. Sostituire eventuali elementi di fissaggio/leve e manopole di regolazione mancanti o usurate.
8. Controllare i punti di rotazione dello schienale e del poggipiedi. Accertarsi che gli elementi di fissaggio non siano allentati.
9. Ispezionare le due staffe di rotazione sotto alla seduta, accertarsi che gli elementi di fissaggio non siano allentati.
10. Ispezionare le viti di regolazione della profondità della seduta sotto l'imbottitura della seduta, assicurarsi che gli elementi di fissaggio siano ben saldi.
11. Controllare che tutte le cinture non siano sfilacciate e che non vi siano fibbie mancanti o rotte.
12. Controllare che tutte le imbottiture non siano usurate.
13. Controllare che la struttura della seduta non presenti usure, scheggiature o rotture.
14. Verificare che l'intera struttura della seduta Discovery non presenti segni di fatica o danni.

Base Verve

Solo per ruote: controllare la pressione dell'aria nelle ruote. Pressione massima dell'aria 1,5 bar.

Controllare che il telaio non presenti usure, scheggiature o rotture.

1. Controllare che la base si stia muovendo senza intoppi e funzioni correttamente. Qualsiasi rumore, vibrazione o movimento insolito del prodotto può essere causato da elementi di fissaggio allentati o da danni al prodotto. Contattare il distributore dello Shuttle Discovery, il fornitore di ausili medici o Medifab caso fosse necessaria ulteriore assistenza, vi aiuteranno a correggere eventuali problemi. Non utilizzare il prodotto fino a quando il problema non sarà stato risolto.
2. Controllare che il maniglione di spinta risulti ben fermo e che non ci sia spazio in corrispondenza del giunto pieghevole.



AVVERTENZA

La fessura del giunto pieghevole può portare allo schiacciamento delle dita dell'utilizzatore e dell'operatore.




Nessuna fessura sul giunto pieghevole



Fessura sul giunto pieghevole e sul disco di bloccaggio sporgente

Se in corrispondenza del giunto pieghevole c'è una fessura o spazio, seguire i passi elencati di seguito.

- a)** Accertarsi che la linguetta pieghevole sia in posizione di blocco, ovvero rivolta verso il basso.
- b)** Sul lato interno del telaio, serrare il dado nyloc M6 (come evidenziato nel cerchio blu) situato al centro del giunto pieghevole di un quarto di giro alla volta.
- c)** Dopo ogni quarto di giro, controllare se la fessura si sta chiudendo e valutare la tensione sulla linguetta pieghevole. La linguetta pieghevole dovrebbe aprirsi e chiudersi con una leggera pressione. Se c'è ancora dello spazio, seguire nuovamente il passo precedente fino a quando la fessura non è più presente, il maniglione di spinta risulta ben fermo e il disco di bloccaggio non sporge dal giunto di bloccaggio.

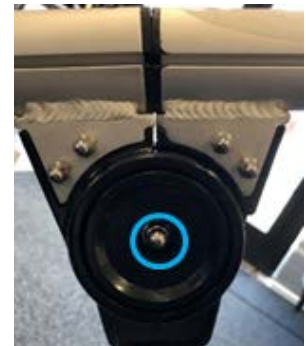

AVVERTENZA

Un serraggio eccessivo del dado nyloc M6 danneggia il bullone a T all'interno del gruppo del giunto pieghevole e apre una fessura in corrispondenza del giunto pieghevole che può eventualmente provocare lo schiacciamento delle dita per l'utilizzatore finale e gli operatori.

- d)** Controllare il gruppo del giunto pieghevole sulla parte esterna del telaio, se il bullone a T (situato nella linguetta di piegatura) risulta danneggiato, deformato o non ha un involucro di plastica nera che lo copre, si prega di richiedere una sostituzione e di **NON UTILIZZARE LA BASE VERVE**.



Il bullone a T danneggiato è visibile attraverso la linguetta pieghevole.



Il bullone a T non risulta danneggiato



e) Con la corretta tensione del bullone a T, non dovrebbe esserci alcun spazio o fessura in corrispondenza del giunto pieghevole, il disco di bloccaggio non dovrebbe essere sporgente e il maniglione di spinta dovrebbe risultare ben fermo.

f) Serrare i dadi piccoli sul lato interno del telaio (evidenziati con cerchi gialli).

g) Se c'è ancora uno spazio in corrispondenza del giunto pieghevole, contattare il rivenditore locale o Medifab e **NON UTILIZZARE LA BASE VERVE.**

3. Controllare che le ruote posteriori siano saldamente bloccate. Rimuovere lo sporco e assicurarsi che le ruote girino liberamente.
4. Controllare che il bloccaggio della ruota anteriore / delle ruote girevoli funzioni correttamente.
5. Controllare che le viti che fissano le barre di montaggio dei sedili anteriori e posteriori siano ben salde.
6. Controllare che l'intera struttura della base non presenti segni di fatica o danni. Controllare che il telaio non presenti usure, scheggiature o rotture.

Base Hi-Lo

1. Ci sono 8 bulloni e dadi M6 sulla base elettrica, si prega di serrare tutti i dadi con una chiave a cricchetto da 10 mm e una chiave a brugola da 4 mm. Assicurarsi che siano visibili almeno due filettature oltre l'anello in nylon sulla ghiera (se si dispone di una chiave dinamometrica, la coppia corretta è di 5Nm).
2. Controllare che la molla ad aria fornisca la forza sufficiente per facilitare la regolazione in altezza. Se la forza della molla è diminuita nel tempo, richiedere la sostituzione della molla.
3. Controllare che il pistoncino di blocco di sicurezza sul pedale stia funzionando.
4. Controllare che le barre di montaggio della seduta sulla base siano saldamente fissate all'interfaccia di montaggio della base.
5. Se la base cigola, applicare una piccola quantità di lubrificante su tutti i giunti.
6. Controllare l'integrità complessiva della base Hi-Lo, ovvero che non ci siano parti allentate e la base deve stare ben posizionata sul pavimento.
7. Controllare che le ruote siano prive da sporcizia e bloccate saldamente.
8. Controllare che la batteria sia carica.
9. Assicurarsi che il pistoncino di sicurezza stia funzionando correttamente sulla base Hi-Lo ad aria.
10. Controllare che il telecomando funzioni correttamente e che il cavo a spirale non sia danneggiato o che ci siano cavi esposti.
11. Controllare che non vi siano danni all'attuatore o alla centralina di controllo sul retro del telaio.
12. Non aprire nessuno dei componenti elettronici. Solo un centro assistenza autorizzato LINAK può riparare il sistema di azionamento elettrico LINAK.

Base a Dondolo Moon Rock:

1. Controllare che i due lati della base Moon Rock Base siano ben stretti.
2. Il meccanismo anti-dondolo anteriore e posteriore funziona correttamente ed è saldamente fissato ai lati.
3. Controllare che le barre di montaggio anteriori e posteriori siano ben fissate.
4. Verificare che l'intera struttura della base Moon Rock non presenti segni di fatica o danni.
5. Controllare che il telaio non presenti usure, scheggiature o rotture.
6. Sostituire eventuali elementi di fissaggio/leve e manopole di regolazione mancanti o usurate.

Base Lunar

1. Controllare che i due lati della base Lunar siano ben stretti.
2. Controllare che le quattro gambe siano ben fissate alla base e livellate.
3. Verificare che l'intera struttura della Base Lunar non presenti segni di fatica o danni.
4. Controllare che il telaio non presenti usure, scheggiature o rotture.
5. Sostituire gli elementi di fissaggio mancanti o usurati.



AVVERTENZA

Se viene rilevato un guasto in una qualsiasi parte del Sistema Shuttle Discovery, non utilizzare il prodotto fino a quando il guasto non sia stato eliminato. Contattare immediatamente il servizio clienti Medifab o il rivenditore locale per ricevere assistenza.

Smaltimento e Riciclaggio

Il vostro Shuttle Discovery è prodotto utilizzando una varietà di materiali, la maggior parte dei quali possono essere riciclati.

Una volta terminato il suo ciclo di vita, se siete proprietari legali, non smaltirlo come i normali rifiuti domestici, ma portare il vostro Discovery in un punto di riciclaggio o di raccolta approvato, per smaltirlo in conformità alle leggi e ai regolamenti locali. La raccolta differenziata e il riciclaggio del Discovery durante lo smaltimento assicura la protezione dell'ambiente e contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.

Il sistema Shuttle Discovery deve essere sottoposto a una manutenzione annuale una volta terminato il periodo di garanzia.

Se si sospetta che lo Shuttle Discovery sia stato sottoposto a un uso intensivo ed è ancora in garanzia, si consiglia di richiedere l'assistenza completa.

Lo Shuttle Discovery deve essere sottoposto a revisione da parte di persona tecnicamente competente/fornitore di ausili medici che con formazione nell'uso del prodotto, da una persona autorizzata Medifab o da un distributore locale.

Per ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti Medifab o il rivenditore locale.

Ciclo di vita: Medifab consiglia di utilizzare lo Shuttle Discovery per un periodo di 4 anni, a condizione che il prodotto sia sottoposto a manutenzione e assistenza secondo le istruzioni del produttore.

Numero di serie di identificazione del prodotto



1. **Seduta Discovery:** Situato sullo schienale.
2. **Base Verve:** Situato all'interno del telaio.
3. **Base Hi-Lo:** Situato sul retro della base.
4. **Base a dondolo Moon Rock** Situato sulla superficie interna della parte laterale.
5. **Base Lunar:** Situato sulla parte laterale della base.



Materia prima del prodotto

1. **Seduta Discovery:** Alluminio e plastica.
2. **Base Verve:** Alluminio e plastica.
3. **Base Hi-Lo:** Acciaio dolce e plastica, batteria elettrica al piombo acido.
4. **Base Lunar:** Legno e alluminio.
5. **Base a dondolo Moon Rock** Legno e Alluminio.
6. **Parti in plastica:** Polietilene ad alta densità.
7. **Cuscino:** Schiuma poliuretana e EVA (Etilene vinil acetato).
8. **Tessuto:** Tessuti in poliestere e nylon.

Esempio di etichetta di serie di identificazione del prodotto (per la seduta)

		New Zealand: 32 Detroit Drive, Rolleston 7675 Australia: 26 Pardoe Street, Devonport, TAS 7310 NZ Call +64 3 307 9790 • AU Call +61 3 6427 0105 solutions@medifab.com • www.medifab.com	
REF 2006-0010-000	Name Discovery Seat		
SN	Weight 25 kg / 55 lbs (seat)		
LOT	Weight 55 kg / 121 lbs (chassis)		
 consult instructions for use	EC REP BEO MedConsulting Berlin GmbH, Helmholtzstr. 2, 10587 Berlin Germany, Tel.: +49-30-318045-51	US REP Medicept, 200 Homer Ave, Ashland MA 01721, United States, Tel.: +1-508-231-8842	

Distributore Medifab

Registrate il distributore Medifab presso il quale avete acquistato il vostro Shuttle Discovery.

Azienda			
Indirizzo			
Telefono		Website	
Contatto		E-mail	
Serie #			


<i>Shuttle Discovery</i>	
Lunghezza totale con poggiamambe	93 cm
Larghezza totale	65 cm
Lunghezza ripiegato	84 cm
Larghezza ripiegato	65 cm
Altezza ripiegato	61 cm
Peso totale	20 kg
Peso della parte più pesante	12.5 kg
Stabilità statica in discesa	0-10°
Stabilità statica in salita	0-10°
Stabilità statica laterale	0-10°
Angolo del piano della seduta	90-160°
Profondità effettiva della seduta	14-30 cm
Larghezza effettiva della seduta	13-27 cm
Altezza della superficie del sedile sul bordo anteriore	64 cm
Inclinazione dello schienale	90-60°
Altezza dello schienale	45-58 cm
Distanza tra il poggiatesta e il sedile	14-28 cm
Angolo di seduta con la gamba	90-160°

<i>Base Lunar: 2006-0013-000</i>	
Larghezza telaio	43 cm
Lunghezza telaio	63 cm
Altezza telaio	17-28 cm
Altezza della seduta dal suolo	22-32 cm
Portata	40 kg
Peso	2.5 kg

<i>Base a Dondolo Moon Rock: 2006-0011-000</i>	
Larghezza telaio	41 cm
Lunghezza telaio	71 cm
Altezza telaio	27.5 cm
Altezza della seduta dal suolo	34 cm
Portata	40 kg
Peso	3.4 kg

<i>Base Hi-Lo:</i>	<i>Ad aria: 2006-0016-000</i>	<i>Alimentato: 2006-0018-000</i>
Larghezza totale telaio	57 cm	57 cm
Lunghezza telaio	69 cm (maniglione escluso)	69 cm (maniglione escluso)
Altezza maniglione	70.5-106.5 cm	71.5-107.5 cm
Altezza della seduta dal suolo	33-69.5 cm	33.5-69.5 cm
Portata	50 kg	50 kg
Peso	18 kg	22 kg

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Manuale: Discovery20200907_IT



medifab



Telefono +64 3 307 9790
Fax +64 3 307 2820
solutions@medifab.com

www.medifab.com

Sede Nuova Zelanda
32 Detroit Drive
Rolleston 7675
Chiamata 0800 543 343

USA	REPP	CE	REPP
Medicept 200 Homer Ave, Ashland, MA 0172, USA Tel: +1-508-231-8842		BEO MedConsulting Berlin GmbH Helmholtzstr. 2 D-10587 Berlino, Germania Tel: +49-30-318045-30	

Sede Australiana
26 Pardoe Street
East Devonport, TAS 7310
Chiamata 1300 543 343